

日常の お手入れ

毎日あるいは使用後のお手入れ

- マスクフレーム、エルボー、マスククッションを手洗いする。
- 分解方法に従ってマスクを分解します。
- 流水ですすぎます。汚れが落ちるまで毛先の柔らかいブラシで洗浄します。
- 液体洗剤を入れたぬるま湯にマスク構成品を最長10分間浸します。
- 構成品をふり洗い、流水ですすぎます。
- 直射日光を避けて自然乾燥させます。マスクフレームのアームはよく絞り、余分な水分を取り除きます。

週一回のお手入れ

- ヘッドギアを手洗いする。
- マスクを分解します。お手入れ中も、マグネットはヘッドギアに付けたままで構いません。
- 液体洗剤を入れたぬるま湯でヘッドギアを手洗います。
- 流水でヘッドギアをすすぎます。
- ヘッドギアを絞って余分な水分を取り除きます。
- 直射日光を避けて自然乾燥させます。


- 警告**
- 良好な衛生状態を保つため、必ず洗浄方法に従い、低刺激性の液体洗浄を使用してください。洗浄剤の中には、マスクおよびその部品や機能に損傷を与えたり、すすぎが不十分だと吸入してしまうような有害な蒸気を残すおそれがあるものがあります。
 - マスクの品質を保ち、健康に有害な影響を及ぼす細菌の繁殖を防ぐため、マスクと構成品は定期的に洗浄してください。

- 注意**
- 本品の構成品に目に見える劣化(亀裂、変色、裂け目など)が確認された場合は、当該構成品を廃棄、交換してください。

AirFit™ F20 マスク

お取扱い クイックガイド

機械器具 (06) 呼吸補助器
一般医療機器
人工呼吸器用マスク (70564000)
届出番号: 13B1X10062000052

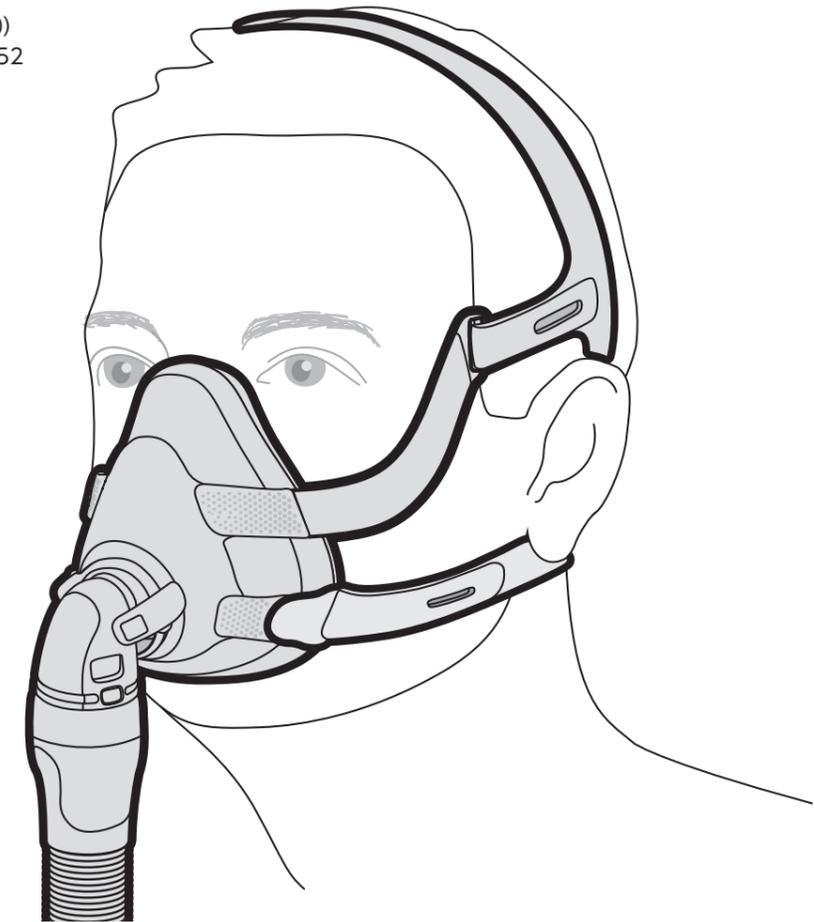

ご使用前に添付文書および取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

製造販売業者 **レスメド株式会社**

販売業者 **帝人ファーマ株式会社**

テイジンCPAPカスタマーセンター
0120-365-474
【受付時間】 10:00~22:00

CPAPユーザー向け情報提供サービス
CPARTNERS
シーパートナーズ
<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



医療機器

L427X12310-02
THC-MSK042-TB-2104-1
2021年4月改訂

CPAPユーザー向け情報提供サービス **CPARTNERS**

マスクの装着・組立てを動画やイラストなどで確認できます。「使い方ガイド」のマスクのページからアクセスして下さい。

CPARTNERS

検索


<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>




AirFit F20 マスク装着手順

ご使用前には、必ず添付文書および取扱説明書をお読みになり、警告、注意事項等をご理解の上、正しくご使用ください。

AirFit F20は、ヘッドギアとマスクから構成されています。

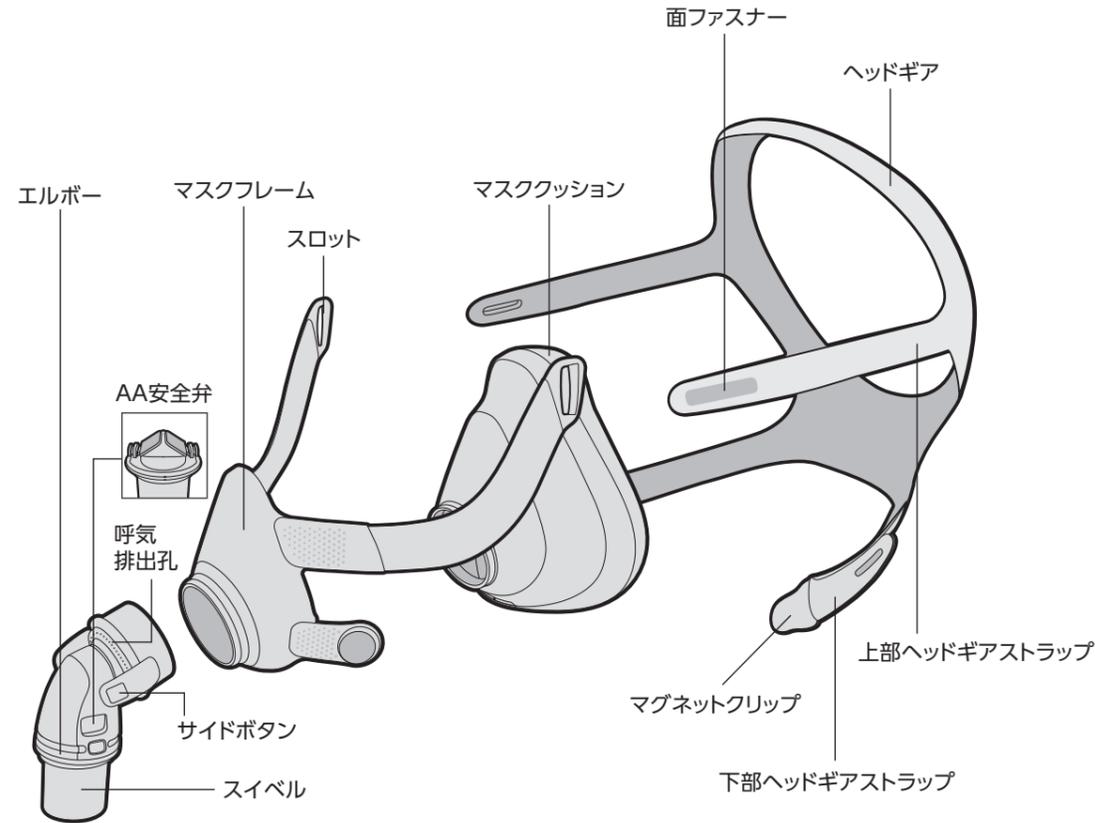

- 1 マスク装着前にマスクフレームから両側のマグネットクリップを取り外す。

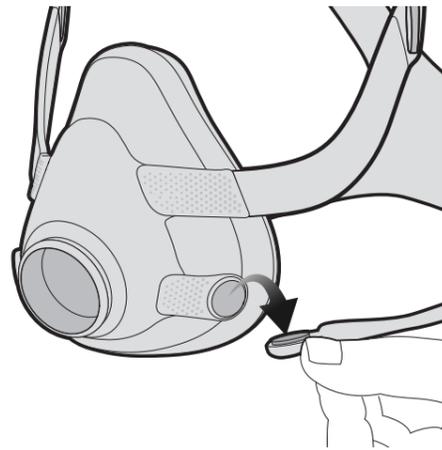

- 2 下部ヘッドギアストラップを両方とも外した状態で、マスククッションを顔に当て、ヘッドギアを頭からかぶる。ヘッドギア後ろのロゴが外側で上下が正しいことを確認する。



- 3 下部ヘッドギアストラップを耳の下まで持っていき、マスクフレームの外側にマグネットクリップを取り付ける。



- 4 上部ヘッドギアストラップの面ファスナーを外す。マスククッションが鼻の上に無理なく配置されるまで上部ヘッドギアストラップを均等に調節する。面ファスナーを再度取り付ける。



- 5 下部ヘッドギアストラップについても4と同様の手順を繰り返す。

