

**警告**

本資材は、電子添文の一部を抜粋したものです。
医師の処方及び指示に従い、ご使用前に電子添文をよく読み、
正しくお使いください。


AirFit™ F20 マスク (ノンマグネティック (NM))

お取扱い クイックガイド

届出番号：13B1X10062000052

製造販売業者：レスメド株式会社

販売名：AirFit F20 マスク(ノンマグネティック (NM))

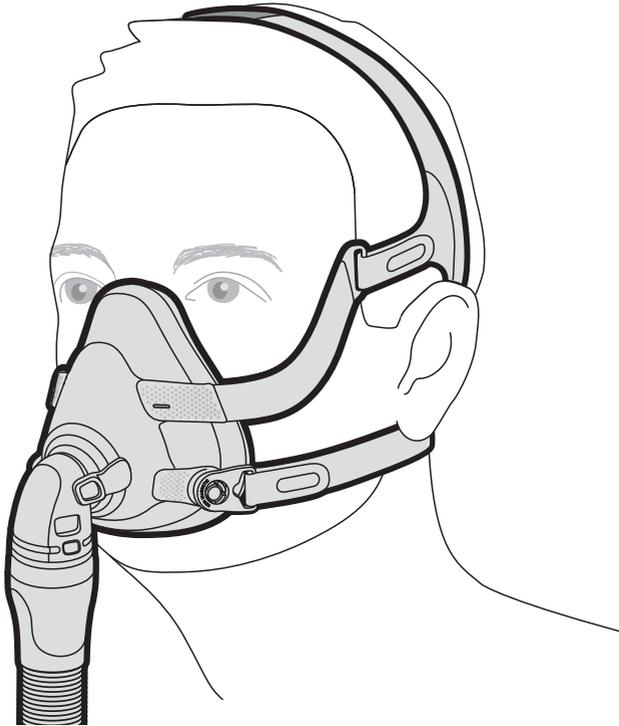


テイジン CPAPカスタマーセンター (フリーダイヤル)

0120-365-474 [受付時間] 10:00~22:00


AirFit™ F20 マスク (ノンマグネティック (NM)) 装着手順

構成

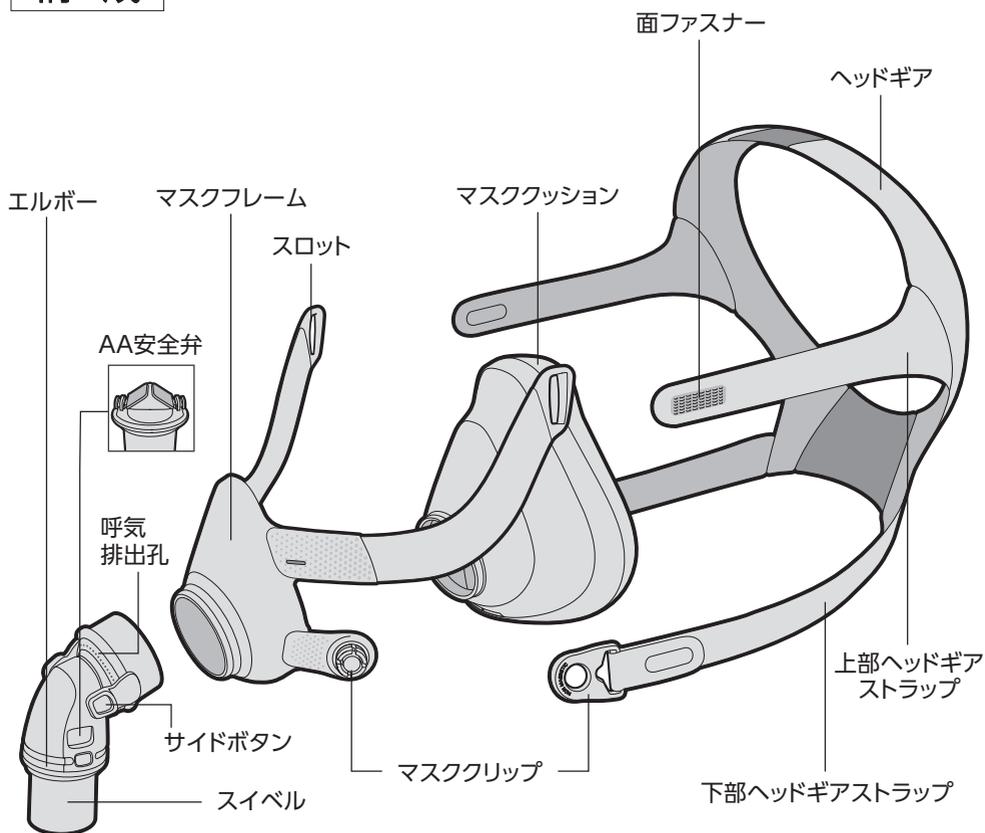

装着について

- 1 マスク装着前にマスクフレームから両側のマスククリップを取り外す。

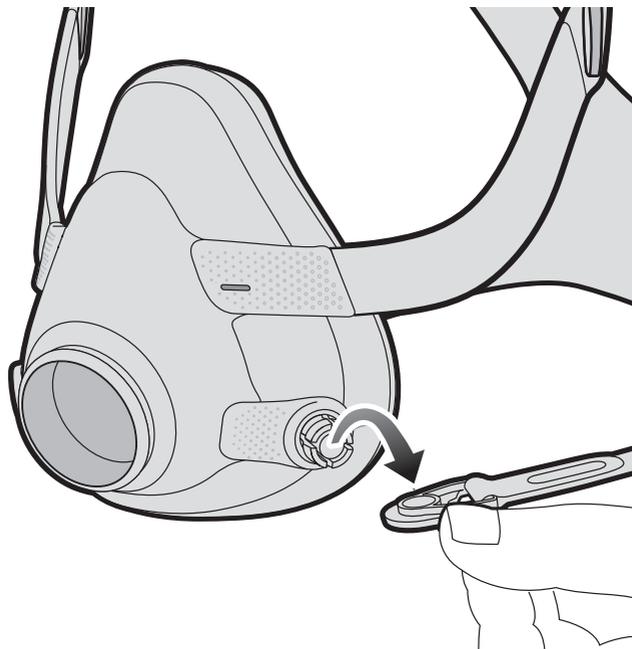

- 2** 下部ヘッドギアストラップを両方とも外した状態で、マスククッションを顔に当て、ヘッドギアを頭からかぶる。ヘッドギア後ろのロゴが外側で上下が正しいことを確認する。




- 3** 下部ヘッドギアストラップを耳の下まで持っていく。マスクフレームの外側にマスククリップを取り付ける。



- 4** 上部ヘッドギアストラップの面ファスナーを外す。マスククッションが鼻の上に無理なく配置されるまで上部ヘッドギアストラップを均等に調節する。面ファスナーを再度取り付ける。



- 5** 下部ヘッドギアストラップについても4と同様の手順を繰り返す。

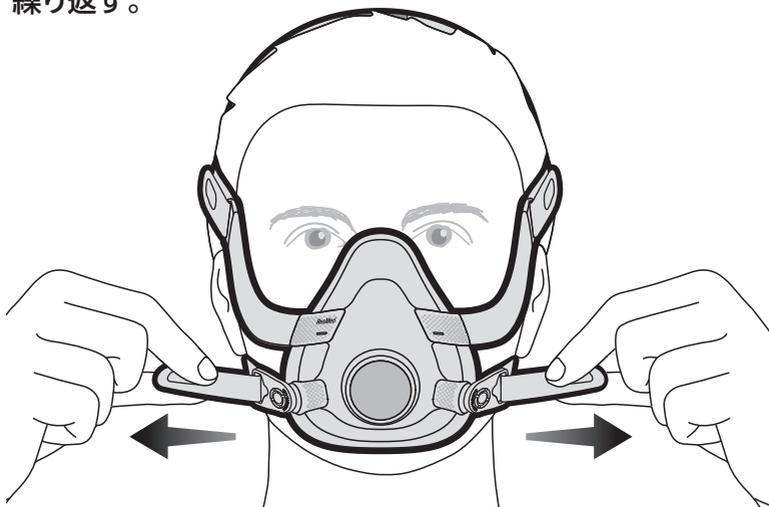

- 6** 装置に接続されているエアチューブとエルボーを接続し、サイドボタンを押しながらマスククッションにはめ込む。

調整について

必要に応じて、マスクの位置を微調整し、最も快適に装着できるようにする。マスククッションにシワができてたり、ヘッドギアがよじれないようにする。

調整のヒント

- ・装置の運転を開始し、装置から空気が送られてきたら、マスクを顔から離してマスククッションを膨らませ、顔に合わせる。
- ・マスクの上部からの空気漏れが生じている場合は、上部ヘッドギアストラップを調整し、下部からの空気漏れには下部ヘッドギアストラップを調整して解消する。
- ・快適に密閉できる程度に調整する。ストラップをきつく締めすぎないこと。快適に装着できなくなるおそれがある。

お手入れ方法

日常の お手入れ

毎日(使用后)：マスクフレーム、エルボー、マスククッションの手洗い

1. 電子添文に記載されている分解方法に従ってマスクを分解する。
2. 流水ですすぐ。汚れが落ちるまで毛先の柔らかいブラシで洗浄する。
3. 低刺激性の液体洗剤を入れたぬるま湯にマスク構成体を最長10分まで浸す。
4. 構成体をぬるま湯につけたまま、ふり洗いをする。
5. エルボーの可動部と呼気排出孔のまわりをブラシで洗う。
6. マスクフレームのアームが接続する部分と、エルボーが接続する部分の内側と外側をブラシで洗う。
7. 構成体を流水ですすぐ。
8. 直射日光を避けて自然乾燥させる。マスクフレームのアームはよく絞り、余分な水分を取り除く。

週1回：ヘッドギアの手洗い

1. マスクを分解する。お手入れ中も、マスククリップはヘッドギアに付けたまま構わない。
2. 低刺激性の液体洗剤を入れたぬるま湯でヘッドギアを手洗いする。
3. 流水ですすぐ。汚れや洗剤が残っていないか確認する。必要に応じて、手洗いとすすぎを繰り返す。
4. ヘッドギアを絞って余分な水分を取り除く。
5. 直射日光を避けて自然乾燥させる。

- 良好な衛生状態を保つため、必ず洗浄方法に従い、低刺激性の液体洗剤を使用すること。洗浄剤の中には、マスクおよびその部品や機能に損傷を与えたり、すすぎが不十分だと吸入してしまうような有害な蒸気を残すおそれがあるものがある。
- マスクの品質を保ち、健康に有害な影響を及ぼす細菌の繁殖を防ぐため、マスクと構成体は定期的に洗浄すること。
- 本品の目視点検基準：本品の構成体に目に見える劣化(亀裂、変色、裂け目など)が確認された場合は、当該構成体を廃棄、交換すること。

ご使用前に電子添文をよく読み、正しくお使いください。
AirFitは、ResMedグループ企業の商標および/または登録商標です。

電子添文



(01)00619498640355

●上記コードをスマートフォンやタブレット端末等の専用のアプリケーション（添文ナビ®）で読み取ると、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページ上に掲載されている最新の電子化された添付文書（電子添文）をご覧いただけます。

