

お手入れ方法

日常の お手入れ

毎日あるいは使用後のお手入れ（洗浄する前に、マスクの構成品を分解します。）

- マスククッションとエルボー付き短チューブを手洗いする。
- 液体洗剤を入れたぬるま湯にマスククッション、エルボー付き短チューブを時々かき混ぜながら最長10分間浸します。
- ぬるま湯を流しながら各構成品を十分すすぎます。
- 直射日光を避けて自然乾燥させてから組み立てます。

週一回のお手入れ（マグネットクリップは付けたまま洗浄できます。）

- ヘッドギアとマスクフレームを手洗いする。
- ヘッドギアとマスクフレームを離し、液体洗剤を入れたぬるま湯に時々かき混ぜながら最長10分間浸します。
- ぬるま湯を流しながら、洗剤が残らないように各構成品をすすぎます。
- 各構成品を絞って余分な水分を取り除きます。
- 直射日光を避けて自然乾燥させてから組み立てます。

- ⚠ 警告**
- 良好な衛生状態を保つため、必ず洗浄方法に従い、低刺激性の液体洗浄を使用してください。洗浄剤の中には、マスクおよびその部品や機能に損傷を与えたり、すすぎが不十分だと吸入してしまうような有害な蒸気を残すおそれがあるものがあります。
 - マスクの品質を保ち、健康に有害な影響を及ぼす細菌の繁殖を防ぐため、マスクと構成品は定期的に洗浄してください。

- ⚠ 注意**
- 本品の構成品に目に見える劣化（亀裂、ひび割れ、裂け目など）が確認された場合は、当該構成品を廃棄、交換してください。

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

AirFit™ N20 マスク お取扱い クイックガイド

機械器具 (06) 呼吸補助器

一般医療機器

人工呼吸器用マスク (70564000)

届出番号：13B1X10062000051



ご使用前に添付文書および取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

製造販売業者 **レスメド株式会社**

販 売 業 者 **帝人ファーマ株式会社**

テイジンCPAPカスタマーセンター



0120-365-474

【受付時間】 10:00～22:00

CPAPユーザ向け情報提供サービス

CPARTNERS

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



医療機器

P140X12310-02
THC-MSK041-TB-2104-1
2021年4月改訂

CPAPユーザー向け情報提供サービス **CPARTNERS**

マスクの装着・組立てを動画やイラストなどで確認できます。「使い方ガイド」のマスクのページからアクセスして下さい。

CPARTNERS

検索


<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



AirFit N20 マスク装着手順

ご使用前には、必ず添付文書および取扱説明書をお読みにになり、警告、注意事項等をご理解の上、正しくご使用ください。


AirFit N20 マスクは、ヘッドギアとマスクから構成されています。

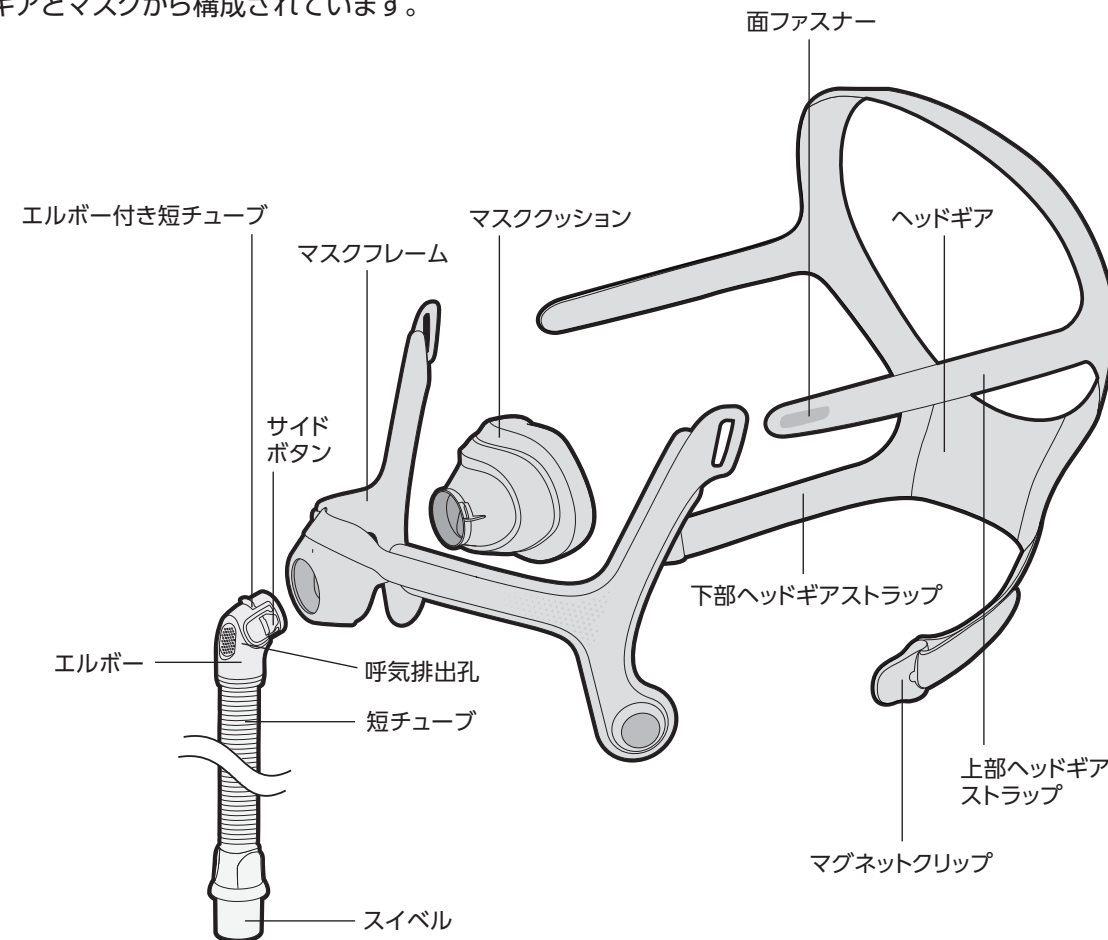

- 1 両側の下部ヘッドギアストラップを外した状態で、マスククッションを鼻に当てヘッドギアを頭にかぶります。ヘッドギアを装着した際に、ResMedのロゴが外側に向き、上下が正しい向きになっているか確認します。




- 2 下部ヘッドギアストラップが耳の下に来るようにして、マグネットクリップをマスクフレームの外側に取り付けます。

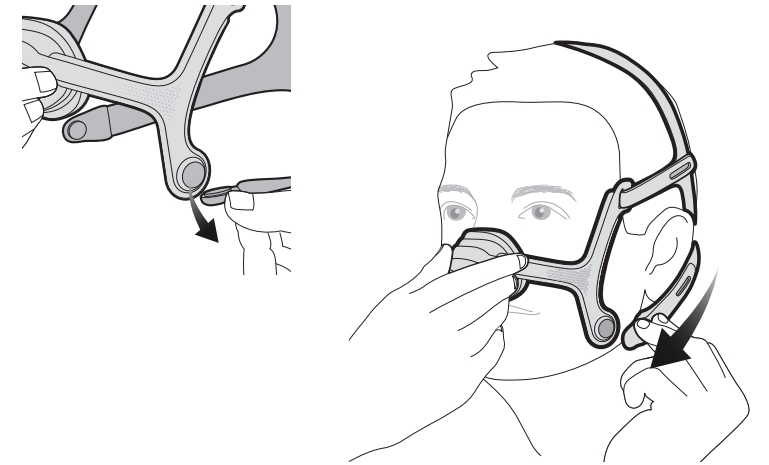


- 3 上部ヘッドギアストラップにある面ファスナーをはがします。鼻がマスクに快適に収まるまでストラップを左右均等に調整します。面ファスナーを再度取り付けます。



下部ヘッドギアストラップにある面ファスナーを外します。マスクがずれなくなるまでストラップを左右均等に調整してください。面ファスナーを再度取り付けます。

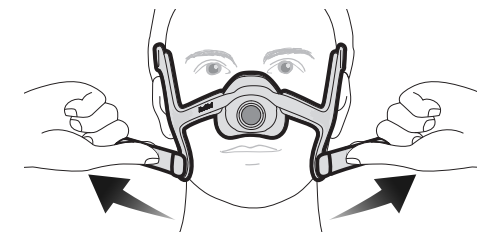

- 4 エアチューブを呼吸補助装置に接続し、もう一方の端はマスク側の短チューブに接続します。エルボーのサイドボタンを押しながら「カチッ」と入るまでエルボーをマスクに押し込み、取り付けます。

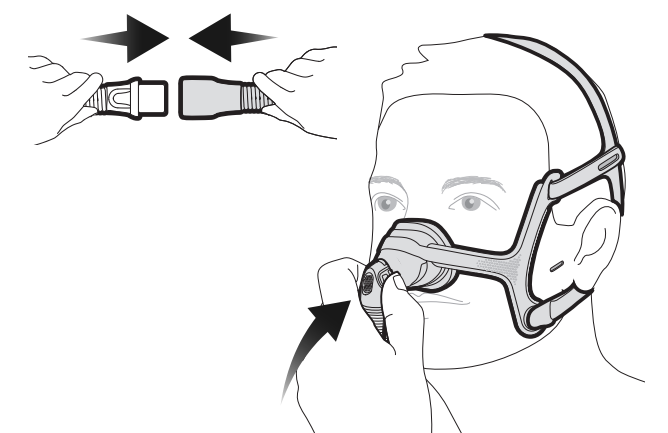

- 5 装置の電源を入れ、送気を開始します。

マスク調整のヒント

マスクの上部からのリーク(空気漏れ)が生じている場合は、上部ヘッドギアストラップを調整し、下部からのリーク(空気漏れ)には下部ヘッドギアストラップを調整して解消します。快適に密閉できる程度に調整します。