

日常の お手入れ

毎使用後：マスククッション

週1回：ヘッドギアとフレーム

- 1.低刺激性の液体洗剤を入れたぬるま湯にマスク構成品を浸します。
- 2.毛先の柔らかいブラシを使って構成品を手洗います。呼吸排出孔には特に注意を払ってください。
- 3.構成品を流水でしっかりすすぎます。
- 4.フレームを振って、呼吸排出孔から余分な水分を取り除きます。直射日光を避けて自然乾燥させます。

マスク構成品を目視で確認し、きれいになっていない場合は、洗浄手順を繰り返します。呼吸排出孔がきれいになっていることを確認してください。

- ⚠ 警告**
- マスクの品質を保ち、健康に有害な影響を及ぼす細菌の繁殖を防ぐため、マスクと構成品は定期的に洗浄してください。
 - 必ず洗浄方法に従い、低刺激性の液体洗剤のみを使用してください。洗浄剤の中には、マスクおよびその部品や機能に損傷を与えたり、有害な残留蒸気を残すおそれがあるものがあります。マスクの洗浄には、食器洗い機や洗濯機を使用しないでください。

- ⚠ 注意**
- 本品の目視点検基準：本品の構成品に目視で確認できる劣化（亀裂、ひび割れ、裂け目など）が確認された場合は、当該構成品を廃棄し、交換してください。
 - 部位を問わず、本品には軟質PVC（ポリ塩化ビニル）製品（例：PVCチューブなど）を直接接続しないでください。軟質PVCに含まれる成分が本品の素材に悪影響を与え、構成品の亀裂や破損の原因となる可能性があります。
 - ヘッドギアの素材は熱に弱く、損傷する可能性があるため、アイロンをかけないでください。

ご使用前に添付文書および取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
AirFitは、ResMedグループ企業の商標および/または登録商標です。
QuietAirは、ResMedグループ企業の商標および/または登録商標です。

製造販売業者 **レスメド株式会社**

販売業者 **帝人ファーマ株式会社**

ティジンCPAPカスタマーセンター

0120-365-474
【受付時間】 10:00～22:00

CPAPユーザ向け情報提供サービス

CPARTNERS
シーパートナーズ

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



医療機器

P146X12300-01
THC-MSK055-TB-2203
2022年3月作成


AirFit™ N30 マスク お取扱い クイックガイド

機械器具 (06) 呼吸補助器

一般医療機器

人工呼吸器用マスク (70564000)

届出番号：13B1X10062000053

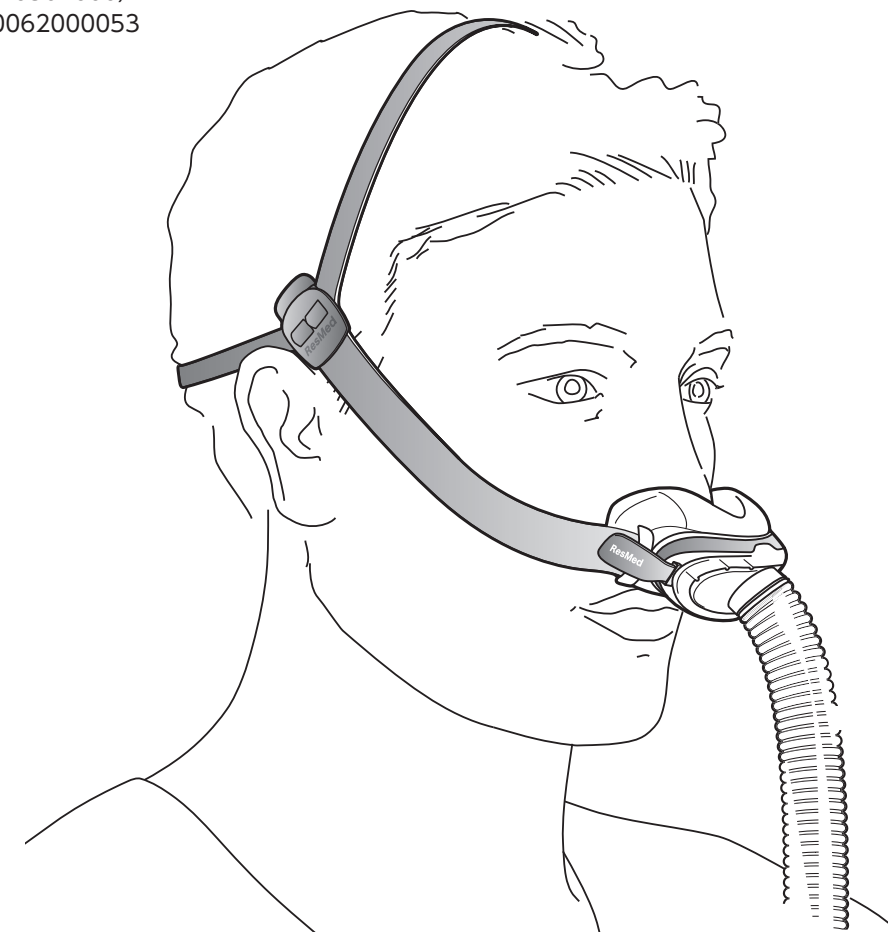

CPAPユーザー向け情報提供サービス **CPARTNERS** シーパートナーズ

マスクの装着・組立てを動画やイラストなどで確認できます。「使い方ガイド」のマスクのページからアクセスして下さい。

CPARTNERS


検索

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



AirFit N30 マスク装着手順


本資材は、取扱説明書の一部を抜粋したものです。
医師の処方および指示に従い、ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

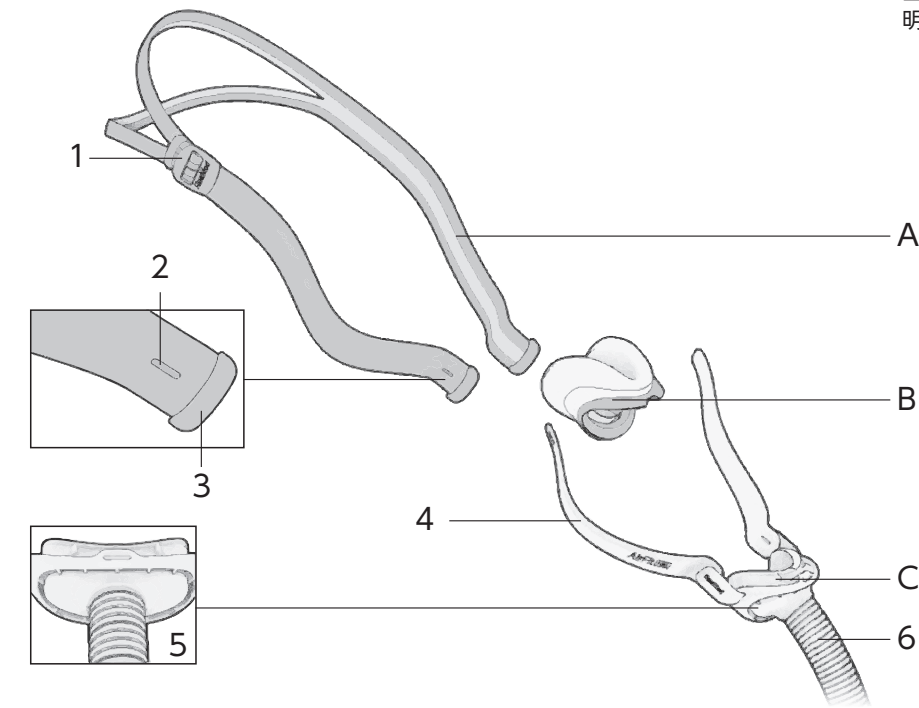


- A スプリットバンド式ヘッドギア (ヘッドギア)
- B マスククッション
- C QuietAir™フレーム (フレーム)
- 1 バックル
- 2 ボタン穴
- 3 エンドキャップ
- 4 固定具
- 5 QuietAir™ 呼気排出孔
- 6 マスクチューブ

装着について

1 クッションを鼻から離して正面から見た時に、マスククッションサイズの左(L)と右(R)の表示の向きが正しいことを確認してください。クッションを鼻の下に当てます。

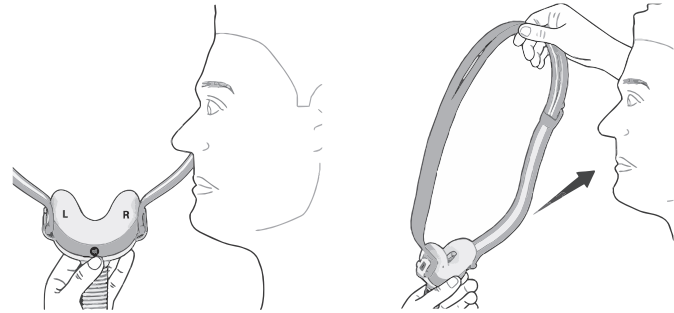


2 下部のヘッドギアを持ちながら、バンドを頭部に覆うようにかけて、後頭部あたりまで引き延ばします。上部のバンドを、頭頂部辺りで収まるようにします。

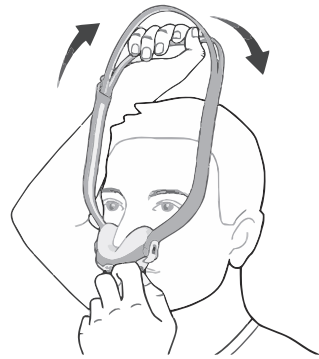

3 マスクを鼻から一度離し、再度、鼻に戻しながら、マスククッションがよりフィットするようにします。



調整について

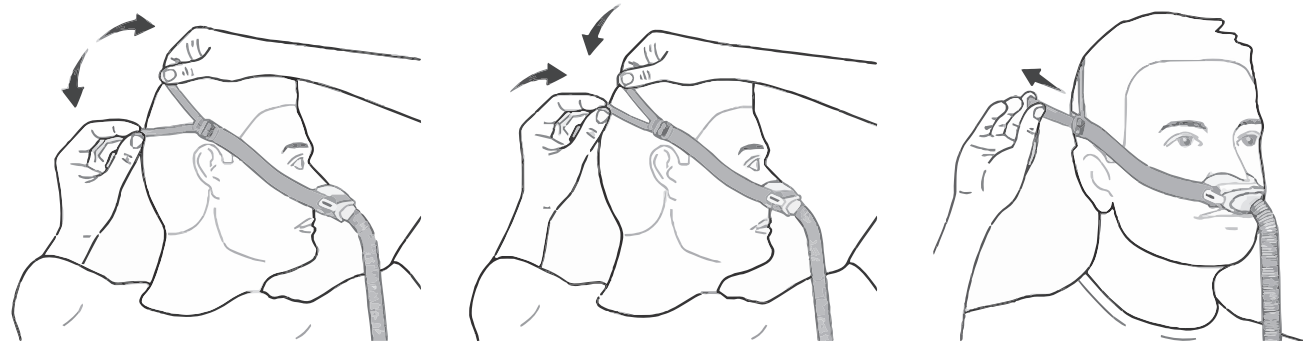

- ・スプリットバンド式ヘッドギアは開口部を開くとゆるみ、閉じると締まるため、その開閉によってヘッドギアの快適さを調節します。
- ・マスクからのエアリークを修正するには、バックルを通してヘッドギアを引っ張り、バックルでヘッドギアの長さ調節をします。マスクが快適に密閉する程度にヘッドギアの長さを調整します。ヘッドギアをきつく締めすぎないでください。ヘッドギアは時間の経過とともに伸びることで、適宜、調整が必要となることがあります。

以上でマスクの装着が完了し、使用する準備が整いました。横になり、装置を稼働させると、チューブ接続部近くの呼気排出孔の周囲に微風を感じます。接続部の近くに指を置いて空気を確かめ、呼気排出孔を点検します。呼気排出孔の周囲を塞がないようにしてください。

取り外しについて

マスクシステムを取り外すには、マスクを顔から離し、頭を覆っているヘッドギアを持ち上げて頭から外します。

