

日常の お手入れ

毎日のお手入れ

布製以外の部品を手洗いしてください。

週一回のお手入れ

布製の部品を手洗いしてください。

• 手洗いによる洗浄方法

1. マスクを分解します。
2. 食器用液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯にマスクを浸し、手洗いします。
注：浸した状態で、マスクの各部品の内側に空気孔がないことを確認してください。
3. 十分にすすぎます。
4. ヘッドギアと布製フレームカバーを平らに置か、吊り干しします。使用前にマスク全体が乾いていることを確認してください。
注：布製の部品は乾燥機を使用しないでください。

• 食器洗い機による洗浄方法

マスクは、手洗いの他に週に1回食器洗い機で洗浄することもできます。

注：マスクの洗浄には食器洗い機用液体中性洗剤のみを使用してください。

1. 布製の部品を取り外します。布製の部品は食器洗い機で洗浄しないでください。
2. 食器洗い機の上段に入れて洗浄します。
注：食器洗い機の乾燥は使用しないでください。
3. 自然乾燥させます。使用前にマスクが乾いていることを確認してください。

⚠️ 注意 この説明書の内容と異なる使用をした場合、この製品の性能に影響を及ぼすおそれがあります。

ドリームウェア ネーザルマスク お取扱い クイックガイド


機械器具 (06) 呼吸補助器
一般医療機器
人工呼吸器用マスク (70564000)
届出番号：13B1X00221000113




ドリームウェアネーザルマスク装着手順

ご使用前には、必ず添付文書および取扱説明書をお読みになり、警告、注意事項等をご理解の上、正しくご使用ください。


ドリームウェアネーザルマスクは、ヘッドギアとマスクから構成されています。

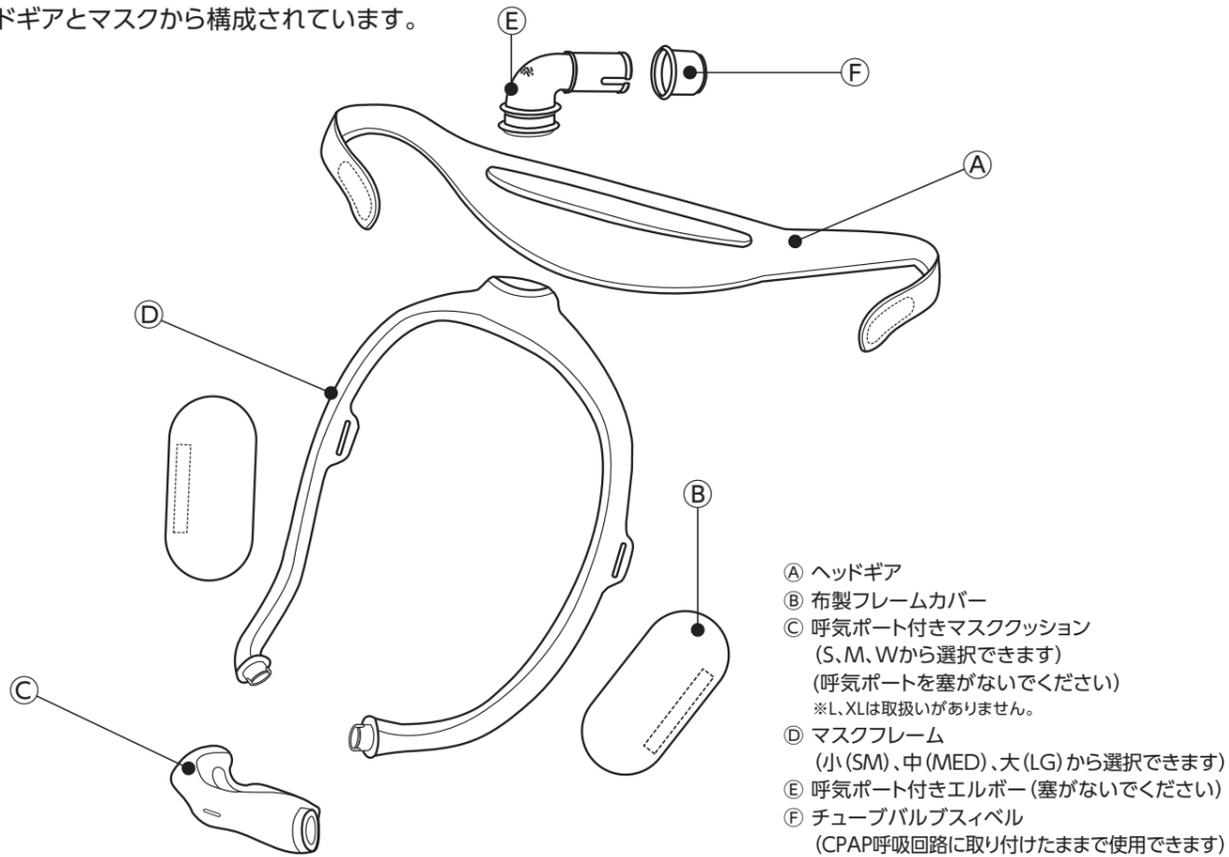

1 マスクを組み立て、クッションを鼻の下に当てます。

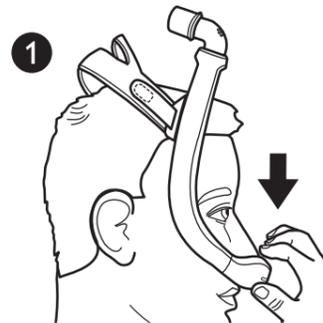

2 フレームを頭の上に取り付けます。

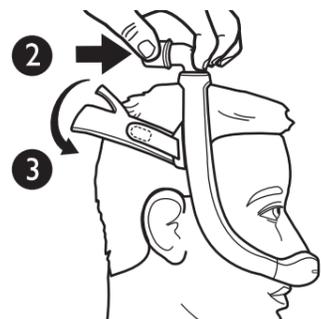


3 ヘッドギアを後頭部にかかるように取り付けます。



4 ヘッドギアのタブをはがし、長さを調整します。タブを押し付けて再装着します。


注：ヘッドギアを締め過ぎないでください。マスクの縁周辺の皮膚の赤み、ただれが見られる場合、または皮膚が押し上げられたりしている場合、締めすぎている可能性があります。

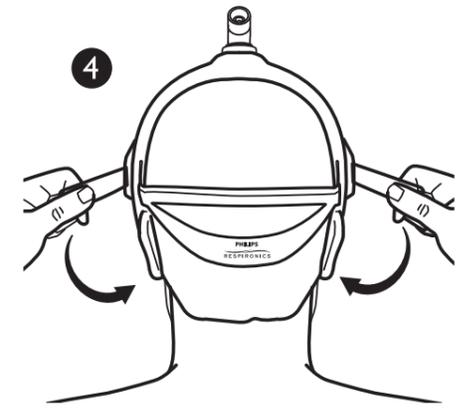

5 マスクが快適に密着するよう固定します。



6 完了すると、エルボーは頭の上に固定されます。

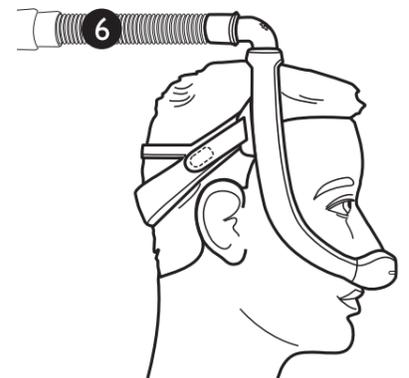

お役立ちヒント

鼻孔の真下にクッションの孔をあてます。クッションが鼻を覆うため、リークを抑えることができます。クッションの孔の中に鼻を入れないでください。

クッションのいずれかの部分が鼻に覆いかぶさっている場合、正しくクッションが装着できていません。別のサイズのクッションに変える必要がある場合があります。

