

お手入れ方法

日常の お手入れ

使用後のお手入れ(毎日)

- ヘッドギアとディフューザー以外を中性洗剤で洗う。中性洗剤には10分以上浸さないようにし、きれいな水ですすぐ。
- 直射日光の当たらない場所で乾燥させてか組み立てる。

週一回のお手入れ

- ヘッドギアとディフューザーを中性洗剤で洗う。ディフューザーを洗う際はこすらないようにすること。中性洗剤には10分以上浸さないようにし、きれいな水ですすぐ。
- 直射日光の当たらない場所で乾燥させてから組み立てる。

お手入れの際の注意点

- アルコール、抗菌剤、防腐剤、漂白剤、塩素、消毒剤、保湿剤などでマスクを洗わないでください。
- 食器洗浄機でマスクを洗わないでください。
- 直射日光が当たらない場所でマスクを保管してください。

上記の行為はマスクの劣化および破損につながるおそれがあり、製品寿命を縮めることとなります。目に見える劣化がある場合は、ただちに使用をやめ、新しい部品に切り替えてください。

⚠注意

- 本品の構成部品によるアレルギーが生じた場合には、直ちに使用を中止し、専門医に相談すること。
- 本品の長時間の使用により皮膚に刺激を認めた場合には使用を中止すること。



(販売名:F&P ネーザルマスク ESON)

お取扱い クイックガイド

機械器具(6) 呼吸補助器
一般医療機器
人工呼吸器用マスク(70564000)
届出番号: 13B1X10045H24203



ご使用前に添付文書および取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

製造販売業者 **フィッシャー&パイクヘルスケア株式会社**

販 売 業 者 **帝人ファーマ株式会社**

ティジンCPAPカスタマーセンター

0120-365-474
【受付時間】10:00~22:00

CPAPユーザ向け情報提供サービス

CPARTNERS
シーパートナーズ

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



医療機器

P142X12310-02
THC-MSK043-TB-2104-1
2021年4月改訂

CPAPユーザー向け情報提供サービス **CPARTNERS**

マスクの装着・組立てを動画やイラストなどで確認できます。「使い方ガイド」のマスクのページからアクセスして下さい。

CPARTNERS

検索


<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



F&Pネーザルマスク ESON 装着手順


ご使用前には、必ず添付文書および取扱説明書をお読みになり、警告、注意事項等をご理解の上、正しくご使用ください。

F&PネーザルマスクESONは、ヘッドギアとマスクから構成されています。

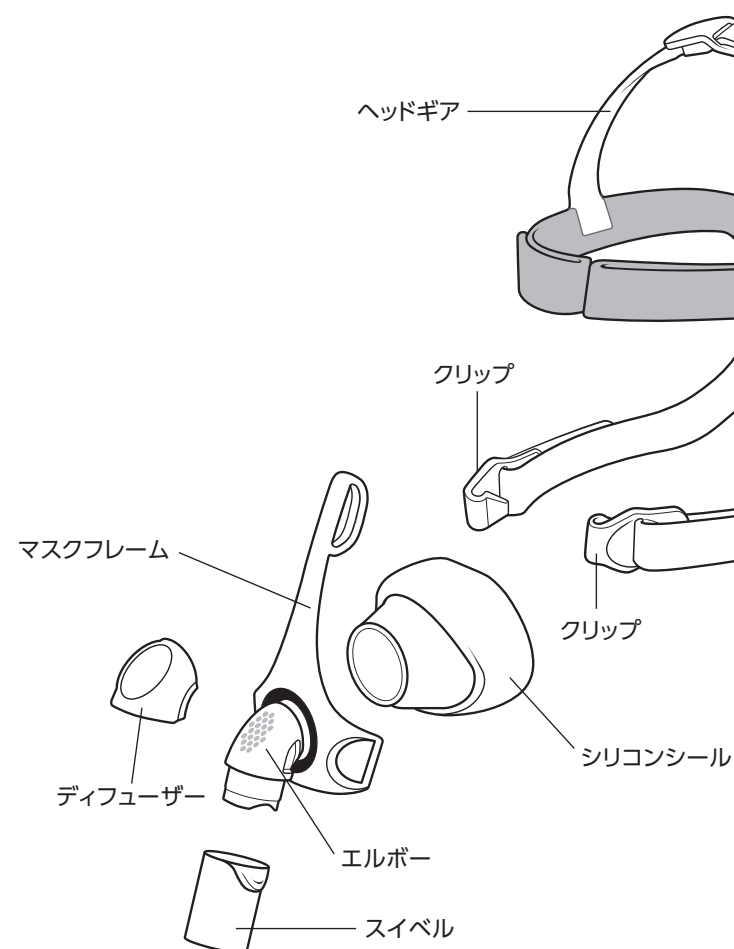

1 使用を開始する前に、梱包材を全て取り外してください。

2 マスクフレームを下向きにした状態で、ヘッドギアの下部のストラップを開きます。

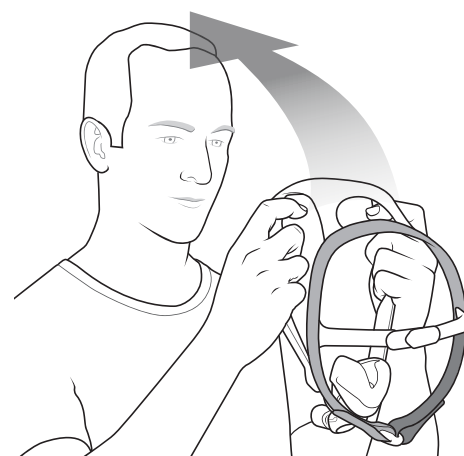


3 シリコンシールが額につくようにしてヘッドギアを頭の上に付けます。



4 シリコンシールが鼻の上にくるよう、マスクフレームの両側にある下部のストラップを下に引っ張ります。この時、上部の青色のストラップが額にくるように調節します。



5 上部の青色のストラップ、下部のストラップを順に締めたら、頭頂部のストラップをゆっくりと締めていきます。

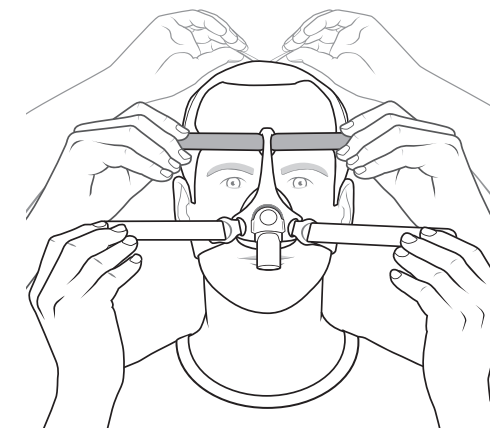

6 上部の青色のストラップは耳の上の位置で、高さが水平になるよう、額に置きます。必要に応じて、頭頂部のストラップで微調整してください。

お役立ちヒント

- ・マスクに空気の漏れがあると感じたら、シリコンシールを顔から持ち上げて、位置を調整してください。
- ・ストラップがきつくなりすぎないように締め過ぎに注意してください。
- ・上部の青色のストラップは耳の上を通過して、水平になるように締めてください。