


「故障かな？」と思ったら

操作パネルの状態

装置が止まっている

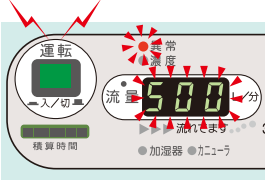

流量表示ランプ 点滅
異常ランプ 点滅
ブザー ピピピピピピ



異常ランプ 点滅
ブザー ピピピピピピ


処置

本しおり表紙の「**連絡先**」まで連絡してください。

以下を確認してください。
 ●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
 ●空気取入口奥にあるブレーカーが切れていませんか。
 ●停電していませんか。

直ちに**酸素ボンベ**に切り替えてください。


装置は動いている

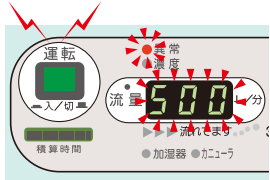

流量表示ランプ 点滅
異常ランプ 点滅
ブザー ピピピピピピ



酸素濃度ランプ 点滅 (赤もしくは緑)
ブザー ピピピピピピ

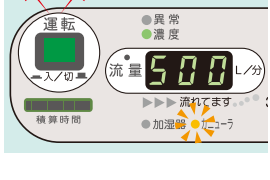

カニューラ折れランプ 点滅
ブザー ピピピピピピ



加湿器漏れランプ 点滅
ブザー ピピピピピピ



流量表示ランプ 点滅
ブザー ピピピピピピ

本しおり表紙の「**連絡先**」まで連絡してください。

防塵フィルタを洗浄してから再運転をしてください。

カニューラや延長用チューブの折れ曲がり、ねじれを直してください。

加湿器を本体から外し、もう一度フタをしっかりと閉め直してから本体に正しく差し込んでください。

流量設定つまみを正しい位置に合わせてください。

取扱説明書の「警報・異常について」の項を見て処置を行っても正常に動作しない場合は、取扱説明書裏表紙あるいは本しおり表紙の「**連絡先**」に連絡してください。

ハイサンソ® 5Fx ご使用のしおり


認証番号: 221ABBZX00224000
製造販売業者: NTKメディカル株式会社

連絡先



警告

本資材は、取扱説明書の一部を抜粋したものです。医師の処方および指示に従い、ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

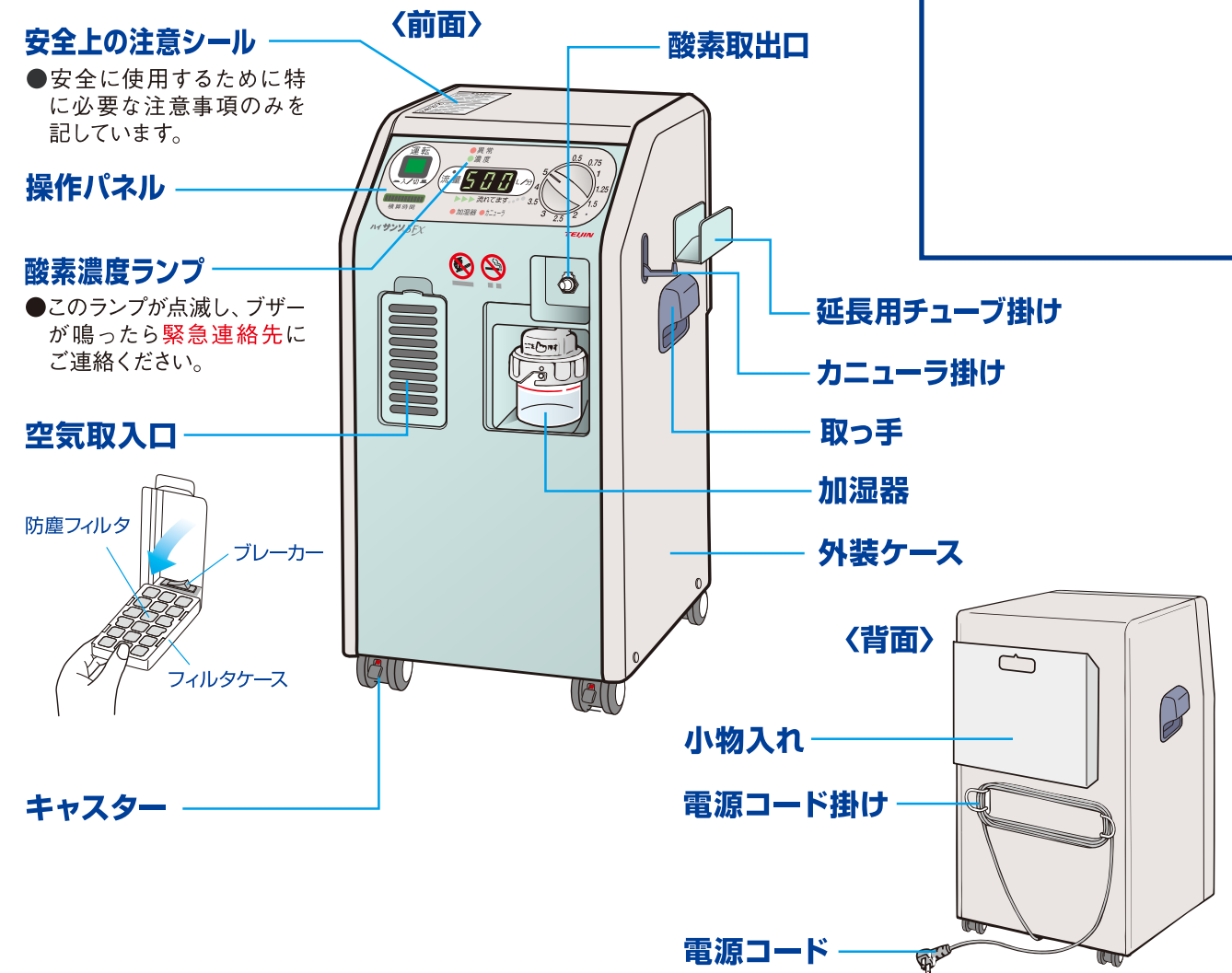

警告



火気厳禁

酸素吸入時は高温の熱源（タバコ、ストーブ、マッチ、ロウソク等）や発火源（スパークを発するおそれのある電気機器等）に近づけないでください。



禁煙

酸素吸入時には本人、まわりの人ともに**禁煙**してください。

タバコ、マッチ、ストーブ等の火気の2m以内では使用しないでください。本人、まわりの人ともにタバコを吸わないでください。火災ややけどの原因になることがあります。

ご使用方法のポイント

運転の前に：加湿器の確認とカニューラの接続

- 1 加湿器が確実に取り付けられていることをご確認ください。
装置本体に内蔵の加湿器だけでご使用になる場合でも加湿器を空のまままで本体に確実に取り付けてください。
- 2 カニューラを酸素取出口に取り付けてください。
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。



酸素取出口



カニューラ

運転のしかた

- 1 医師の処方箋による流量になるように、流量設定表示を見ながら流量設定つまみをまわしてください。
- 2 運転スイッチを押して「入」(スイッチが押し込まれた状態)にしてください。
約2秒間ブザーが鳴った後、動作を開始し、約25秒たった後に流れ表示ランプが点滅することを確認してください。
運転スイッチを押してから約5分たった後、酸素濃度ランプが緑に点灯したら装置が使用に適した状態となります。

流量設定表示



運転スイッチ

酸素濃度ランプ



流れ表示ランプ

- 3 カニューラを鼻に装着し、吸入を始めてください。

鼻で吸ってください。



運転の終わり方


- 1 鼻からカニューラを外してください。
- 2 運転スイッチを押して「切」(スイッチが手前に上がった状態)にしてください。

お手入れのしかた

お手入れは、かならず本装置を停止して行ってください。

防塵フィルタ

- ① フィルタケースの上部のつまみを手前に引いて、フィルタケースを外します。
- ② フィルタケースより防塵フィルタを引いて外してください。
- ③ 掃除機で防塵フィルタのほこりを吸い取ってください。

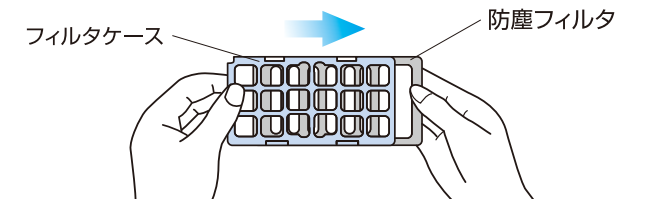

掃除機で防塵フィルタのほこりを吸い取ってください。

防塵フィルタ


防塵フィルタは週に1回洗浄し、清潔を保ってください。(ホコリを落としてから中性洗剤を入れたぬるま湯の中でよく洗い、水道水でよくすすいだ後、日陰で乾燥させてください)

加湿器

- 必ず精製水を使い、週に1回は水を交換してください。
- 精製水は加湿器の上限の赤い線まで入れてください。
- 加湿器のフタを回してしっかりと閉めてください。※




つけ方

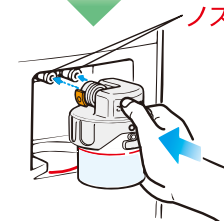

本体の2本のノズルにフタの穴を合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。

はずし方

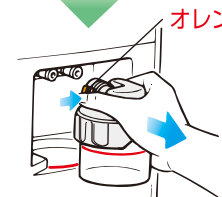

フタのオレンジのボタンを押しながら手前に引いてください。

※フタがゆるんでいて酸素が漏れていると、ブザーが鳴り、加湿器漏れランプが点滅します。(加湿器酸素漏れ警報)

随時

本体の外装ケースが汚れてきましたら、電源コードのプラグをコンセントから外し、乾いた柔らかい布か、よく水を絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。(本体、加湿器の拭き取り、洗浄にはアルコール、ベンジン、シンナー等を使用しないでください。)

注意

- 性能保証のため、定期的に装置の点検を行いますのでご了承ください。