

本体電池 / 予備電池について

1. 電池の使用時間※1

流量設定	連続0.5L / 分	同調1L / 分相当	同調2L / 分相当	同調3L / 分相当
本体電池	約2時間20分	約2時間30分	約2時間30分	約2時間30分
本体電池 + 予備電池	約4時間40分	約5時間	約5時間	約5時間

※1 新品・満充電時25℃の場合の目安です。使用時間は、充電状態や電池の劣化度、使用環境温度またはオートデマンド機能動作状況によって異なります。

2. 満充電までの時間※2

本体電池	約3時間	予備電池	約3時間
------	------	------	------

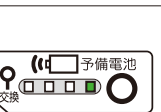
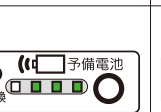
※2 電池が空の状態からACアダプターで充電した場合の時間です。DCアダプターで充電した場合は、充電時間が長くなります。

3. 電池残量の確認方法

残量を確認するときは、本体電池確認ボタン 、または予備電池確認ボタン  を押してください。残りどれだけ使えるかの目安を確認できます。

  は点灯（ランプがついている状態）、  は点滅（ランプがついたり消えたりしている状態）を表します。

コンセント・シガレットライターソケットに接続せず運転または停止しているとき（非充電中）

						
本体電池						
予備電池						
残量	運転不可	5分未満	25%未満	25%～50%	50%～75%	75%～100% 満充電

ハイサンソ ポータブルα[®] (Rev.2)

「故障かな？」のしおり

認証番号: 224ADBZX00143000
製造販売業者: 帝人ファーマ株式会社



本資材は、取扱説明書の一部を抜粋したものです。医師の処方および指示に従い、ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

本資材は、装置の上面ラベルの色が黄色の場合が対象です。



ハイサンソ ポータブルα[®]の処方

安静時	同調1・2・3 L/分相当	連続流0.5L / 分	時間
労作時	同調1・2・3 L/分相当	連続流0.5L / 分	時間
睡眠時	同調1・2・3 L/分相当	連続流0.5L / 分	時間

体調が悪い時は主治医にご連絡ください

医療機関名

電話番号

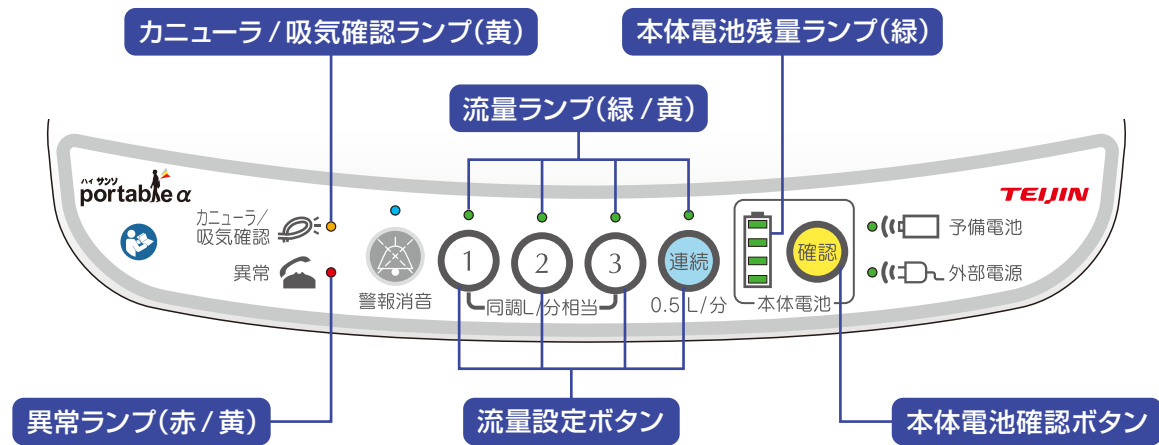
あなたの主治医

先生

連絡先

「故障かな？」と思ったら

酸素ボンベ等の代替酸素供給源をお備えの方は、**酸素ボンベ等**に切り替えた上で下記の**処置**を行ってください。
下記の処置を行っても解決しない場合や、該当項目のない場合は、本装置を停止して「**連絡先**」に連絡してください。



赤 ● 黄 ● 緑 ● 緑 ■ は点灯 (ランプがついている状態) を表します。

赤 ● 黄 ● 緑 ● 緑 ■ は点滅 (ランプがついたり消えたりしている状態) を表します。

本装置の状態	原因	処置
異常ランプ (赤) が点滅し、ブザー (ピピピ ピピ) が鳴っている。	● 本装置内部の異常です。	● 本装置を停止して「連絡先」に連絡してください。
異常ランプ (黄) が点滅し、ブザー (ピピピ) が鳴っている。	● 本装置内部の異常です。	● 本装置を停止して「連絡先」に連絡してください。
異常ランプ (黄)、本体電池残量ランプ (緑) の一番上と一番下が点滅し、ブザー (ピピピ) が鳴っている。	● 本体電池が故障、または著しく劣化しています。	● ACアダプター、DCアダプター、または予備電池による運転に切替えてください。 ● 「連絡先」に連絡してください。
カニューラ/吸気確認ランプ (黄) が点灯し、ブザー (ピピ) が鳴っている。	● 3分間呼吸を検出していません。 ・ カニューラ等が本装置から外れていたり、折れ曲がっていたり、つぶれたままの状態になっている、または口呼吸になっていることが考えられます。	● カニューラ等が本装置から外れていないかを確認し、外れていたら酸素取出口へ正しく接続してください。 ● カニューラ等の折れ曲りやつぶれがないかを確認し、折れ曲りやつぶれがあれば直してください。 ● カニューラを正しく装着してください。 ● 鼻呼吸をおこなってください。
異常ランプ (黄) が点灯し、ブザー (ピピ) が鳴っている。	● 酸素濃度が低下しています。	● 本装置を停止して「連絡先」に連絡してください。

本装置の状態	原因	処置
流量ランプ (黄) が点灯している。	● 本装置が始動期間中であることを示しています (酸素濃度が取扱説明書に規定された濃度に達した後は緑色に変わります)。	● 3分程度お待ちください。なお解除までの時間は、流量設定や使用環境温度、内部部品の状態によって変動します。
流量ランプ (黄) が点灯し、本体電池残量ランプ (緑) の一番下が点滅し、ブザー (ピピ) が鳴っている。	● 本体電池の残量が低下しています。 ・ およそ5分で本装置が停止します。(*) (*残り使用時間は、設定流量やバッテリーの劣化度によって異なります。) ● 電源供給がありません。 ・ ACアダプター、DCアダプターまたは予備電池が正しく接続されていないか、停電の可能性が考えられます。	● そのまま使用を続けると本装置が停止します。直ちにACアダプター、DCアダプター、または予備電池に正しく接続し使用してください。 ● 停電の場合等は、医師からの事前の指示に従って、代替の酸素供給源に切替えてください。
カニューラ/吸気確認ランプ (黄) が点灯している。	● 30秒間呼吸を検出していません。 ・ カニューラ等が本装置から外れていたり、折れ曲がっていたり、つぶれたままの状態になっている、または口呼吸になっていることが考えられます。	● カニューラ等が本装置から外れていないかを確認し、外れていたら酸素取出口へ正しく接続してください。 ● カニューラ等の折れ曲りやつぶれがないかを確認し、折れ曲りやつぶれがあれば直してください。 ● カニューラを正しく装着してください。 ● 鼻呼吸をおこなってください。
本体電池残量ランプ (緑) の一番下が点滅し、ブザー (ピー) が15秒間鳴っている。	● 本体電池の残量がなくなりました。 ・ 本装置が停止します。	● 直ちにACアダプター、DCアダプター、または予備電池に正しく接続し使用してください。
本体電池残量ランプ (緑) の一番上と一番下が点滅し、ブザー (ピピ) が15分おきに鳴っている。	● 本体電池の温度が高すぎたり低すぎたりした場合に、一時的に充電できない状態です。 ※ 酸素は通常とおり吸入できます。	● 本体電池が充電に適した温度の範囲になると、充電が可能となります。室温が5℃以上、35℃以下の場所にしばらく置いてから、再度充電してください。半日程度経っても充電が再開されない場合は本体電池の故障が考えられますので、「連絡先」に連絡してください。
予備電池の交換ランプ (赤) が点灯している。	● 予備電池が劣化し、交換時期になりました。	● 「連絡先」に連絡してください。
流量設定ボタンを押しても動作しない。	● 電池の残量がなくなり、本装置が起動できません。 ● 本装置が使用環境範囲を外れている、または保管環境範囲を外れて保管されていた可能性が考えられます。 ● 本装置内部の異常です。	● 直ちにACアダプター、DCアダプター、または予備電池に正しく接続し使用してください。 ● しばらく使用環境範囲に置いてなじませてから運転してみてください。 ● 「連絡先」に連絡してください。

● その他の場合

本装置が以下の状態になった場合は、本装置を停止し、すぐに本装置をコンセントやシガレットライターソケットから取り外してください。予備電池は本体から取り外してください。その後で、「**連絡先**」に連絡してください。

- 落下、転倒により、強い衝撃が加わった。
- 本装置内部に水等が入った。
- 本装置から煙が出ていたり、異音や異臭がする。
- 本体および予備電池の使用、充電、保管時に異臭、発熱、液漏れ、変色、変形その他今までと異なることがある。
- 充電中に、充電完了時間の目安を超えても充電が完了しない。