

日常の お手入れ

- 毎日、マスククッションの内側、外側を湿った布でふいてください。
- 週に1回、マスクを分解した後に、それぞれの部品を中性洗剤等を使用し、ぬるま湯で手洗いします。よくすすいだ後、水気を切って日陰で自然乾燥させます。
- ヘッドギアは手で洗うようにしてください。初めのうちは、色落ちすることがあります。

⚠ 警告


- 推奨する洗浄・消毒液以外の塩素系、アルコール系、トルエン、ベンゼン等の芳香族系溶液、漂白剤、アロマ・オイル、薬用石鹸を用いて洗浄しないでください。部品が硬化したり、製品寿命を縮める原因となります。
- ヘッドギアにはアイロン等で高熱を加えないでください。劣化の原因となります。

❗ 重要

- マスク構成部品を直射日光にさらさないでください。劣化の原因となります。

ミラージュアクティバ®LTマスク お取扱い クイックガイド

機械器具 (06) 呼吸補助器
一般医療機器
人工呼吸器用マスク (70564000)
届出番号：13B1X00059000156

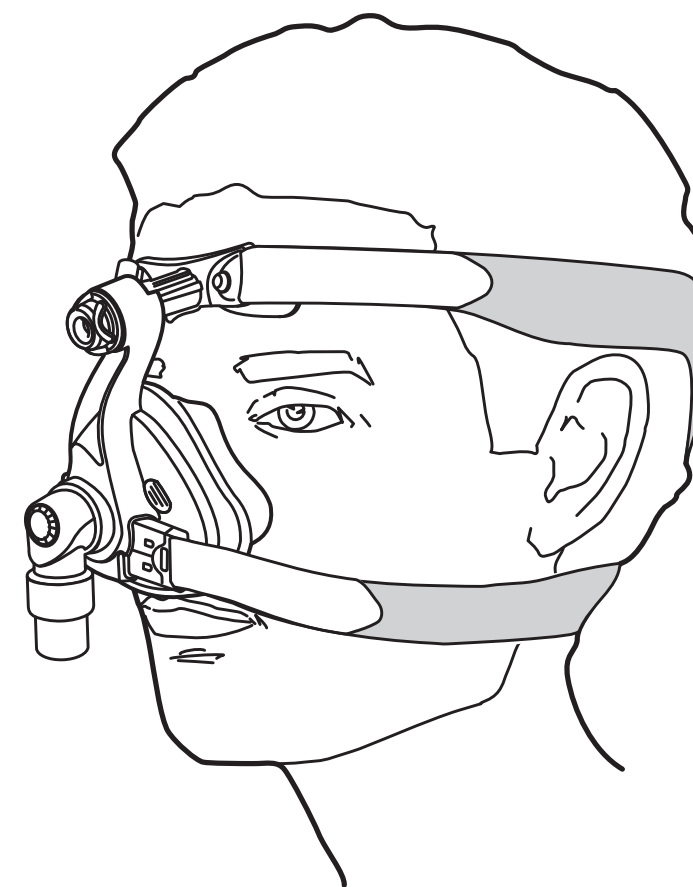

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りします。

■ 本マスクを使用する前に、電子添文および付属の取扱説明書をよく読むこと。

製造販売業者 帝人ファーマ株式会社

テイジンCPAPカスタマーセンター

0120-365-474
【受付時間】 10:00～22:00

CPAPユーザー向け情報提供サービス

CPARTNERS
シーパートナーズ

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



医療機器

P117X12310-02
THC-MSK023-TB-2206-2
2022年6月作成

CPAPユーザー向け情報提供サービス CPARTNERS

マスクの装着・組立てを動画やイラストなどで確認できます。「使い方ガイド」のマスクのページからアクセスして下さい。

CPARTNERS

検索


<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



ミラージュアクティバLT マスク装着手順

本資料は、取扱説明書の一部を抜粋したものです。医師の処方および指示に従い、ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

ミラージュアクティバLTマスク(アクティブセルタイプ)は、
ヘッドギアとマスクから構成されています。

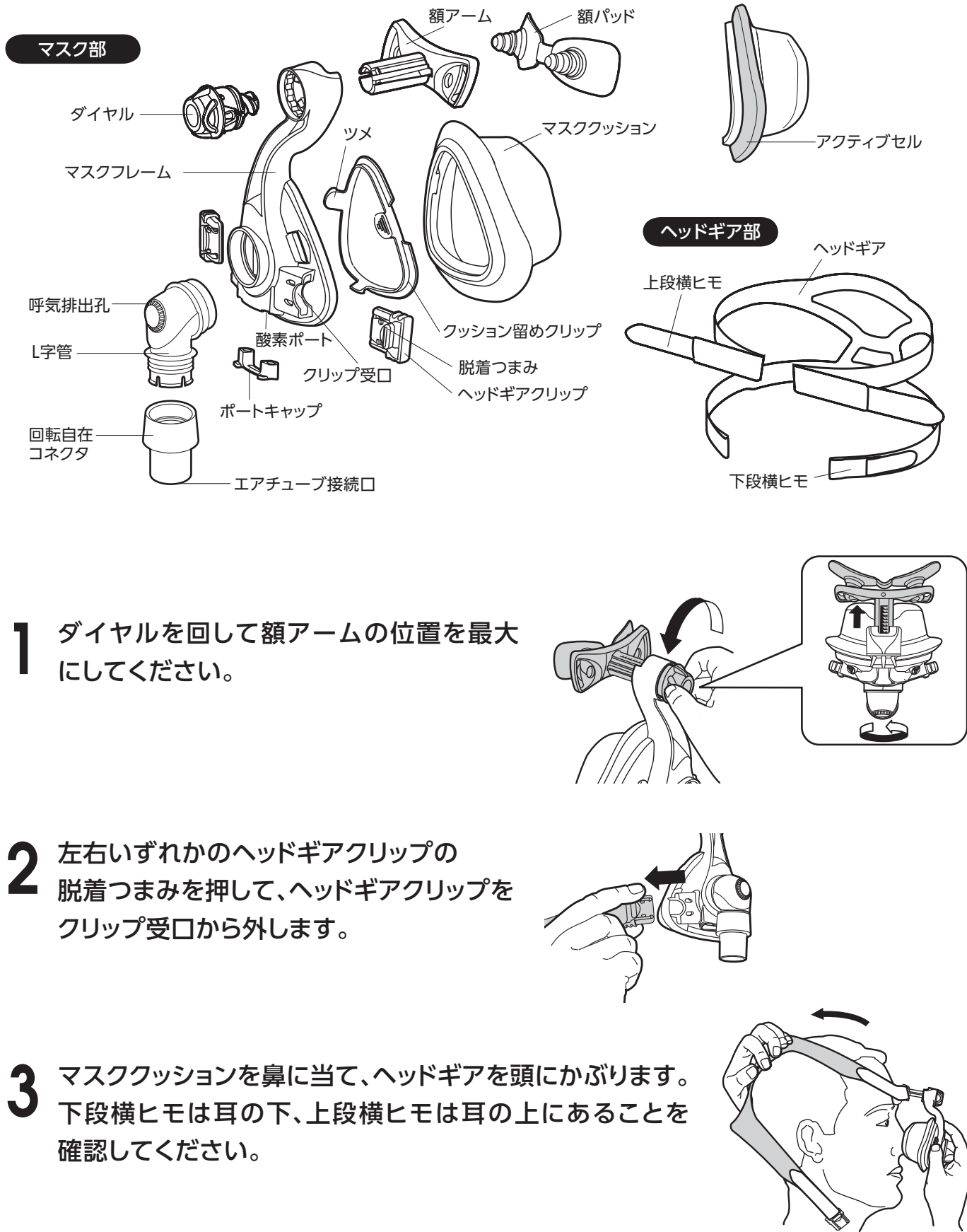

1 ダイアルを回して額アームの位置を最大にしてください。

2 左右いずれかのヘッドギアクリップの脱着つまみを押して、ヘッドギアクリップをクリップ受口から外します。

3 マスククッションを鼻に当て、ヘッドギアを頭にかぶります。下段横ヒモは耳の下、上段横ヒモは耳の上にあることを確認してください。

4 外していた側のヘッドギアクリップをクリップ受口に再び接続します。

5 上段横ヒモを額パッドが軽く額にあたる程度に締めてください。

6 下段横ヒモを軽く締めてください。このとき、顔と下段横ヒモの間に指が2本入る程度の余裕を持たせてください。

横ヒモはきつく締めすぎないように注意してください。

7 エアチューブを回転自在コネクタのエアチューブ接続口につなぎます。

8 エアチューブの他方の端を呼吸補助装置に接続し、運転を開始します。

9 横になって、睡眠の姿勢をとります。空気漏れがなくなるようにダイアルを回転させて額アームの位置を調整します。

10 上下段の横ヒモの長さを調整して固定します。アクティブセルが適度に均等にふくらむように横ヒモの長さを調整します。

11 空気漏れがなくならない場合は、マスクのサイズを変更してみてください。

