

セーフスはレンタル機器です。 治療終了時にはご返却ください。

【使用上の注意】

- ・位置決めマーク(×印)は消えないように油性ペンで書き込んでください。
- ・主治医の指示に従い、一日一回20分の治療を毎日続けてください。
- ・ゼリーの使い方は「取扱説明書」および「超音波用ゼリー説明書」をご確認ください。
- ・レンタル期間中の故障には無償交換いたします。

レンタル期間のご案内(医療機関記入欄)



超音波骨折治療法
(原則 最長3ヶ月)



難治性骨折超音波治療法
(最長12ヶ月)

※超音波骨折治療法から難治性骨折超音波治療法に処方変更があった場合は、合わせて最長15ヶ月です。

レンタル終了日

年

月

日

- 今回の治療に使用するセーフスはレンタル機器です。
- 終了日が近づいてきましたら主治医にご確認ください。
- 治療終了後は、下記のフリーダイヤルにご連絡いただき、返却の手続きをお願いいたします。

セーフスカスタマーセンター(ティジン)

病院からの委託により治療期間中のセーフスのアフターサービスは、ティジンが行います。
次のような場合には、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

- 1) 消耗品の交換(超音波ゼリーがなくなったなど)
- 2) 故障・設定使用回数に達した
- 3) 治療終了に伴う返却
- 4) その他

また、ご使用確認のため、ティジンから電話連絡をさせていただくことがあります。



0120-50-7888

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～17:00

在宅用医療機器の操作に関する動画および操作ガイドを掲載しています。

帝人ファーマ 一般

検索

<https://www.teijin-pharma.co.jp/healthcare/index.html>



超音波骨折治療器

セーフス exogen® 操作早見表

認証番号 227ADBZX00180000
製造販売業者 帝人ファーマ株式会社
販売名 セーフス®exogen®

ご注意いただきたい事項

本資料は、取扱説明書の一部を抜粋したものです。医師の処方および指示に従い、ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。



医師のつけたマーク(×印)に固定具の中心を合わせる。



ベルト付き固定具を骨折部位に巻き付け、黒リングにベルトをくぐらせる。



ベルトを折り返して、ベルト固定部にしっかりと留める。




超音波トランスデューサーに、写真の量程度の超音波用ゼリーをのせる。




キャップの切り欠きの位置にケーブルが入るように、超音波トランスデューサーの向きを合わせて挿入する。




キャップを閉じる。

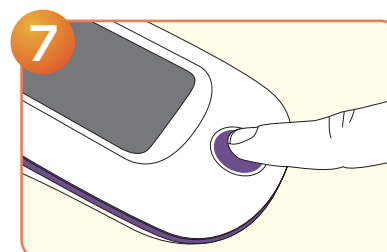


ON/OFFスイッチを押すとブザー音が鳴り、自己診断が約2秒間行われる。

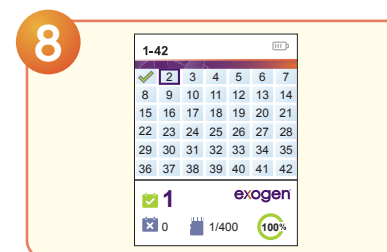

直近の治療履歴画面が約5秒間表示される。

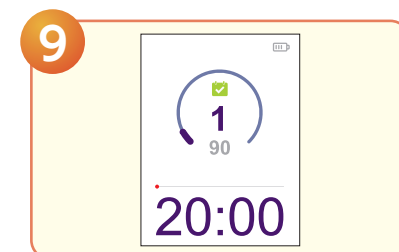

超音波照射中を示すアイコンが表示されていることを確認する。

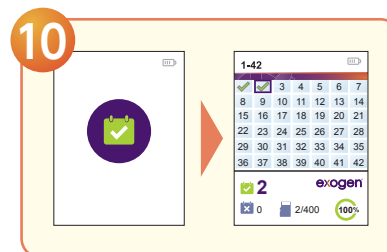

治療開始から20分後に、ブザー音が鳴り、治療終了画面、治療履歴画面が表示された後、自動的に電源が切れる。



①キャップを開け、②超音波トランスデューサーの根元を持って、まっすぐ上に取り出す。

注意! コードを無理に引っ張らないでください。(断線の原因になります)




固定具を取り外し、超音波トランスデューサー、固定具や皮膚に付着した超音波用ゼリーをティッシュペーパーなどで拭き取る。




充電方法

1

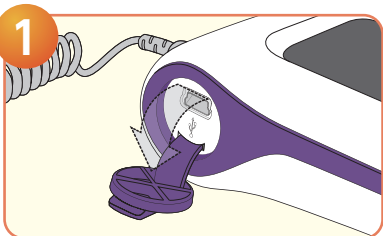

充電ポートのキャップを開く。

2

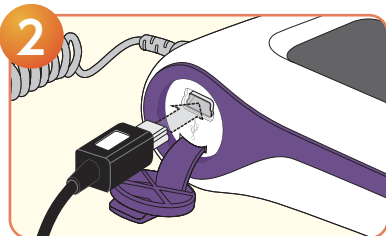


専用充電器をコンセントに接続する。充電器のUSBプラグを本体の充電ポートに接続する。

3




充電中は、バッテリーマークの目盛3つの状態で点滅する。充電が完了するとすべての目盛が点灯する。

4

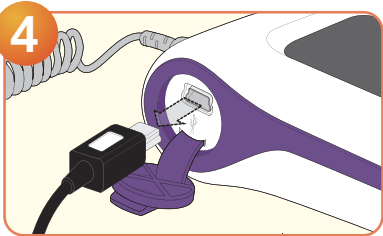

充電が完了したら、充電器のUSBプラグを本体から取り外す。

5

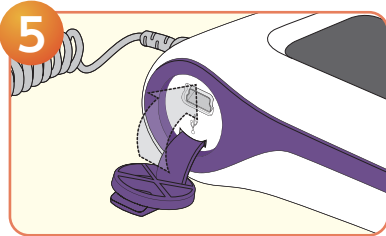


充電ポートのキャップを閉じる。

専用SDカードの交換方法（市販のmicroSDカードは使用できません。）


専用カードに治療可能回数の上限があらかじめ設定されています。設定された治療可能回数の上限に達した場合は、裏表紙の「連絡先」に問い合わせてください。主治医より治療継続が必要と判断された場合、新しい専用SDカードに交換して治療を継続します。

1

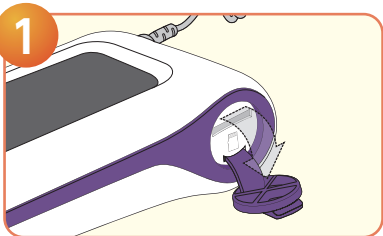


電源が入っていないこと、充電中でないことを確認し、SDカードポートのキャップを開く。

2

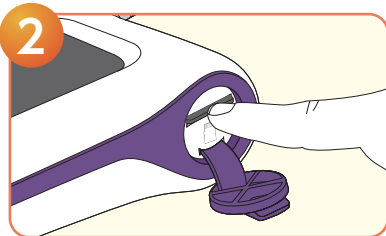


SDカードを指で押し込んで放し、取り出す。

3

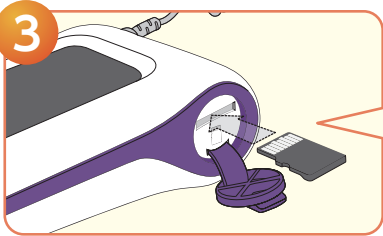


新しいSDカードをSDカードポートにカチッと音がするまで挿入する。

4

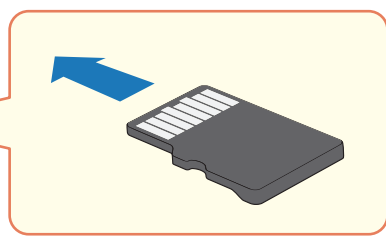

金属の端子を上側にして矢印の向きに挿入する。

4

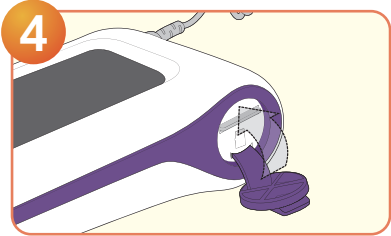


SDカードポートのキャップを閉じる。

治療履歴の確認方法

治療履歴の
見方

ログデータ

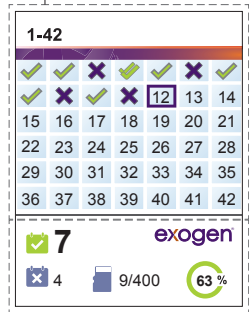

*画面は表示例です。

サマリーデータ

ログデータ

1-42	×	20分間の治療を行わなかったことを示します。
✓	20分間の治療を行ったことを示します。	
✓✓	20分間の治療を2回行ったことを示します。	
✓+	20分間の治療を3回以上行ったことを示します。	

42日間分の履歴が1画面に表示されます。最初に治療を行った日からの経過日数が数字で表示され、当日が紫色で囲われます。



サマリーデータ

7	exogen	20分間の治療を行った日数
4	9/400	20分間の治療を行わなかった日数
63%		これまで治療を行った回数と設定された治療可能回数の上限を表示します。
100%		治療開始日から経過日数に対する、20分間の治療日数の割合。 (使用状況により数値が変わります。)

治療履歴の
確認手順



本体に電源が入っていないこと、充電器が接続されていないことを確認します。図の画面が表示されるまでON/OFFスイッチを押し続けます。

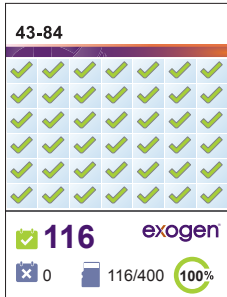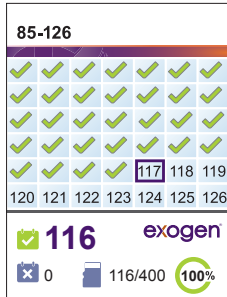

*画面は表示例です。

直近の治療画面から順に、5秒間表示され、自動的に次の画面に切り替わります。治療履歴画面表示中にON/OFFスイッチを押すと、一時停止できます。もう一度ON/OFFスイッチを押すと一時停止を解除できます。

2