






# 充電方法

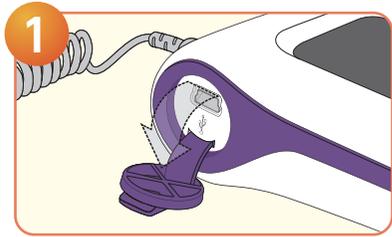


充電ポートのキャップを開く。

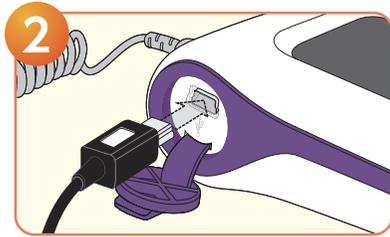


専用充電器をコンセントに接続する。充電器のUSBプラグを本体の充電ポートに接続する。

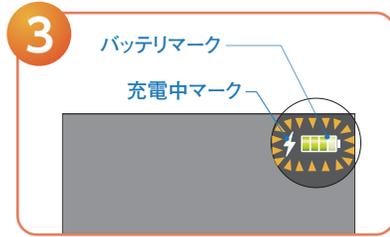

充電中は、バッテリーマークの目盛3つの状態で点滅する。充電が完了するとすべての目盛が点灯する。

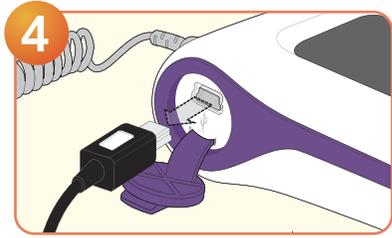

充電が完了したら、充電器のUSBプラグを本体から取り外す。

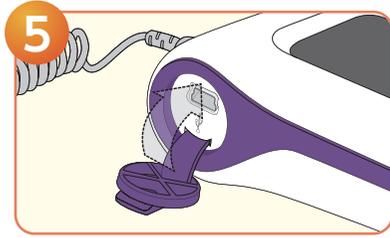


充電ポートのキャップを閉じる。

# 専用SDカードの交換方法 (市販のmicroSDカードは使用できません。)


専用カードに治療可能回数の上限があらかじめ設定されています。設定された治療可能回数の上限に達した場合は、裏表紙の「連絡先」に問い合わせてください。主治医より治療継続が必要と判断された場合、新しい専用SDカードに交換して治療を継続します。




電源が入っていないこと、充電中でないことを確認し、SDカードポートのキャップを開く。

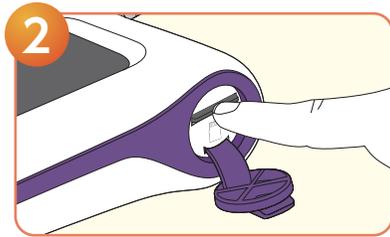


SDカードを指で押し込んで放し、取り出す。

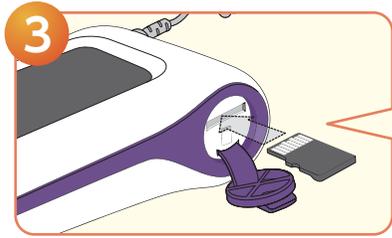

新しいSDカードをSDカードポートにカチッと音がするまで挿入する。

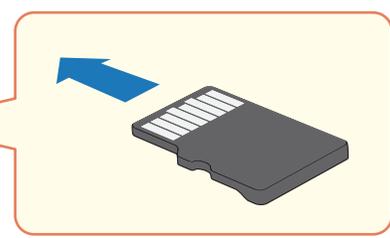

金属の端子を上側にして矢印の向きに挿入する。

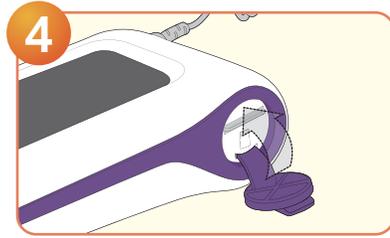

SDカードポートのキャップを閉じる。

※使用済SDカードは自治体の基準に従い廃棄ください。


# 治療履歴の確認方法

## 治療履歴の見方



ログデータ サマリーデータ


## ログデータ

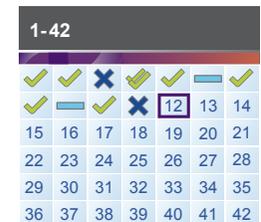

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ✕  | 治療を行わなかったことを示します。       |
| ✓  | 20分間の治療を行ったことを示します。     |
| ✓+ | 20分間の治療を2回行ったことを示します。   |
| ✓+ | 20分間の治療を3回以上行ったことを示します。 |
| —  | 治療を途中で中断したことを示します。      |

42日間分の履歴が1画面に表示されます。最初に治療を行った日からの経過日数が数字で表示され、当日が紫色で囲われます。

## サマリーデータ



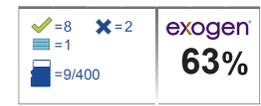


|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ✓                       | 20分間の治療を行った回数                         |
| ✕                       | 治療を行わなかった日数                           |
| —                       | 治療を途中で中断した時間の合計が20分に達するごとに1回カウントされます。 |
| 📄                       | これまで治療を行った回数と設定された治療可能回数の上限を表示します。    |
| 100% (使用状況により数値が変わります。) | 治療開始日から経過日数に対する、20分間の治療日数の割合。         |

## 治療履歴の確認手順



本体に電源が入っていないこと、充電器が接続されていないことを確認します。図の画面が表示されるまでON/OFFスイッチを押し続けます。

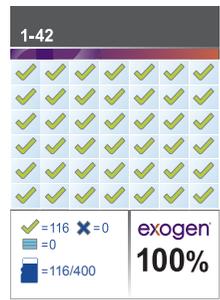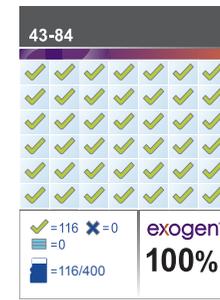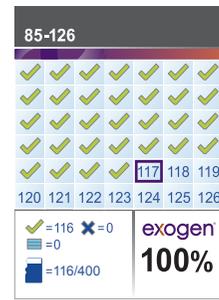

直近の治療画面から順に、5秒間表示され、自動的に次の画面に切り替わります。治療履歴画面表示中にON/OFFスイッチを押すと、一時停止できます。もう一度ON/OFFスイッチを押すと一時停止を解除できます。

\*画面は表示例です。