

酸素ボンベ使用時間のめやす

■19.6MPa（200kg/cm²） 充てんの場合

設定流量 （L / 分）	酸素ボンベタイプ				
	V1.0	V1.1	V2.0	V2.1	V2.8
	DF1020A	ALT764J/ALT501Y 112C	ALT765J/ALT502Y DF2020A/EHB	212C	EN/282C
0.25	11 時間 45 分	12 時間 40 分	23 時間 20 分	25 時間	32 時間 50 分
0.5	5 時間 40 分	6 時間 20 分	11 時間 40 分	12 時間 30 分	16 時間 20 分
0.75	3 時間 50 分	4 時間 10 分	7 時間 20 分	8 時間 20 分	10 時間 50 分
1	2 時間 40 分	3 時間	5 時間 40 分	6 時間 40 分	8 時間 10 分
1.5	1 時間 50 分	2 時間	3 時間 40 分	4 時間 20 分	5 時間 20 分
2	1 時間 10 分	1 時間 20 分	2 時間 20 分	3 時間	4 時間
2.5	50 分	1 時間	2 時間	2 時間 20 分	3 時間 10 分
3	50 分	1 時間	1 時間 40 分	2 時間	2 時間 40 分
4	40 分	45 分	1 時間 20 分	1 時間 20 分	2 時間
5	40 分	40 分	1 時間	1 時間 10 分	1 時間 30 分
6	—	—	50 分	1 時間	1 時間 20 分
7*	—	—	40 分	50 分	1 時間 10 分
8*	—	—	40 分	40 分	1 時間
10*	—	—	—	40 分	40 分

*10L / 分タイプの流量設定器の設定可能流量です。

⚠ 注意

●

●

● 使い方によって使用時間は異なりますので、自分のペースをつかんでください。
● 上記の時間はあくまでもめやすです。ご使用前には、残量を確認してください。

ご使用者

様

年 月 日

酸素流量

使用時間のめやすは

安静時設定

L / 分の場合

時間

分

労作時設定

L / 分の場合

時間

分

ご使用の酸素ボンベは

型です。

緊急時の連絡先

お体の具合が悪い時

油性ペンで記入してください

医療機関：_____

診療科：_____科

主治医：_____先生

TEL：_____

酸素の充てんを依頼するとき

故障や異常のとき


高圧ガスレギュレータ
流量設定器 TR

届出番号 13B1X00059000074

操作早見表

《19.6MPa（200kg/cm²）版》

各部の名称

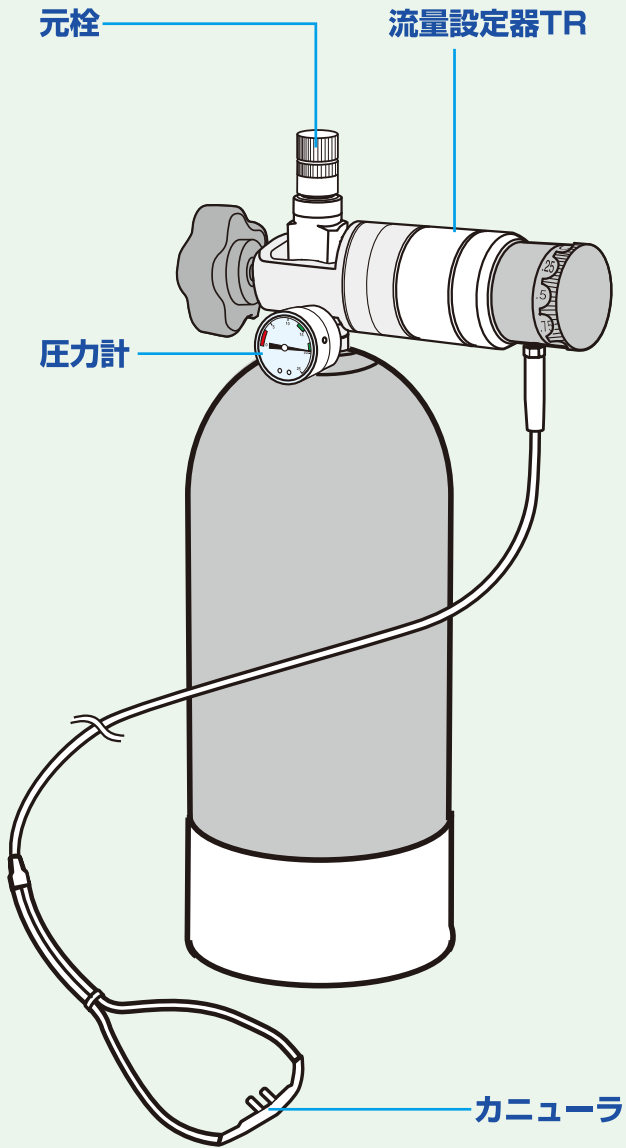

製造販売業者 帝人ファーマ株式会社


医療機器

THC-HOT015-TB-2104-8
2021年4月改訂


TEIJIN

吸入の開始


1 酸素残量を確認。

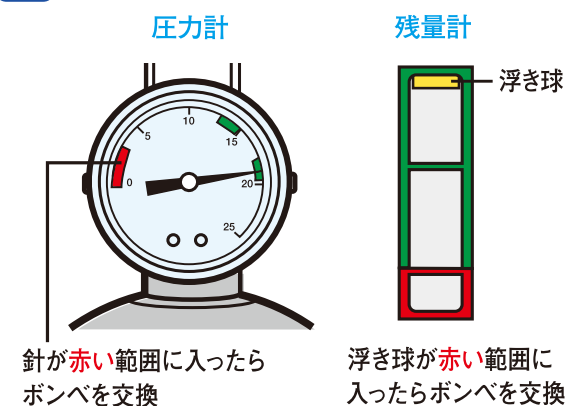

2 ポンペの元栓をゆっくり開く。

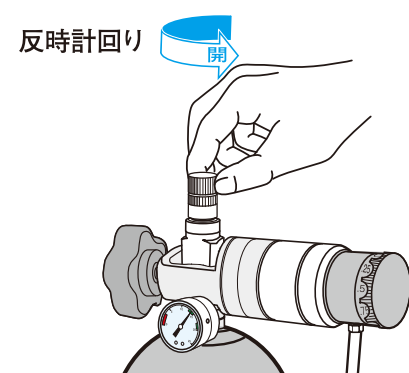

3 ダイヤルを医師に処方された流量の数字に合わせる。

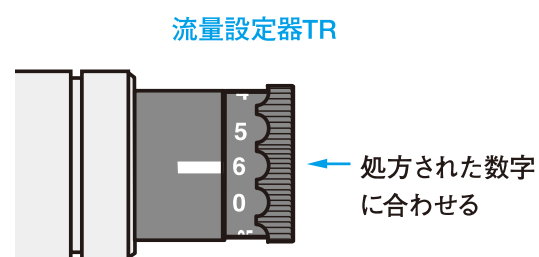


4 カニユーラで酸素吸入。



吸入の停止

1 ポンペの元栓を閉じる。

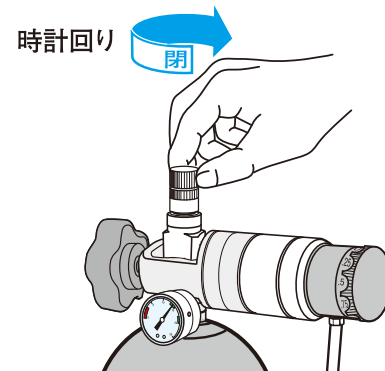


2 カニユーラを外します。



酸素ボンベの交換

1 圧力計の針または残量計の浮き球が赤い範囲にきたら交換。

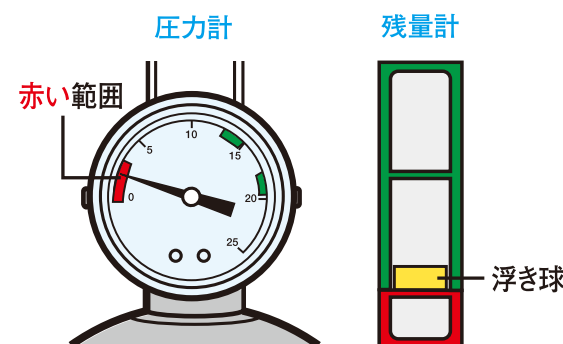


2 元栓が閉じていることを確認。





3 ダイヤルを“0”以外の流量に合わせる。

*流量設定器内に残っている酸素を逃がします

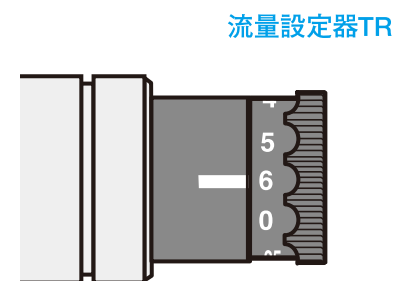


(上の図は“6”に合わせた場合を示しています)


4 流量設定器TRをはずす。

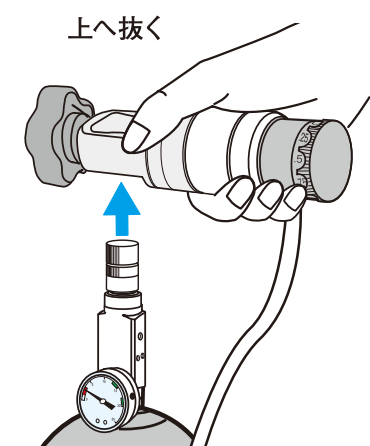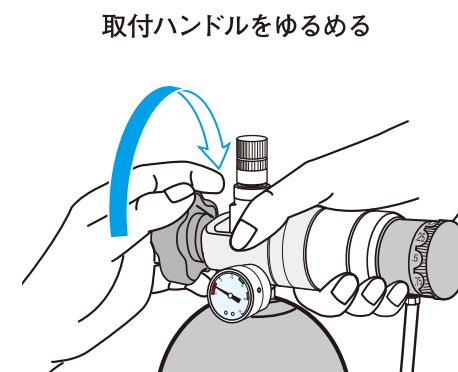



5 封印キャップをはずし、新しいボンベに流量設定器TRをつける。

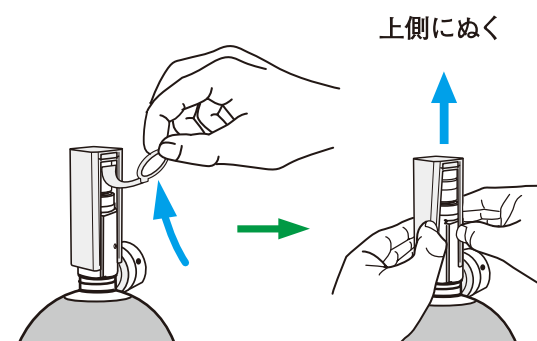

穴とピンを確認する。

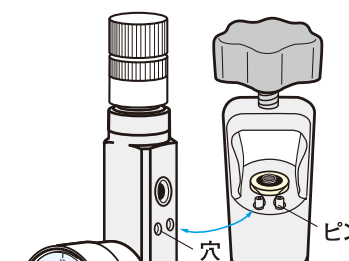


充填済み酸素ボンベに流量設定器TRを取り付けます。

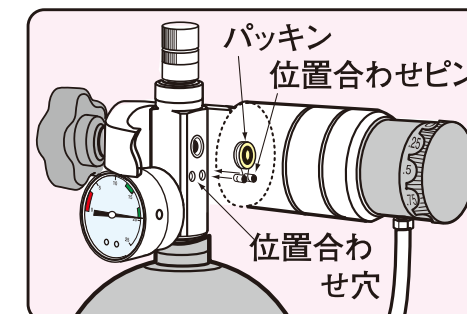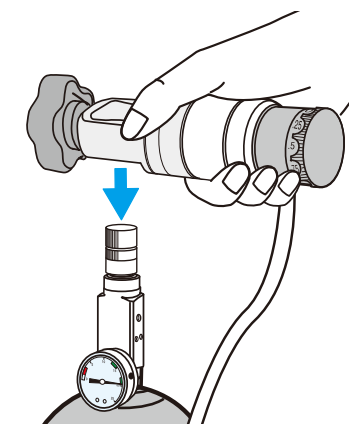

位置合わせ穴に位置合わせピンが入るように

取付ハンドルを十分に締め付けます

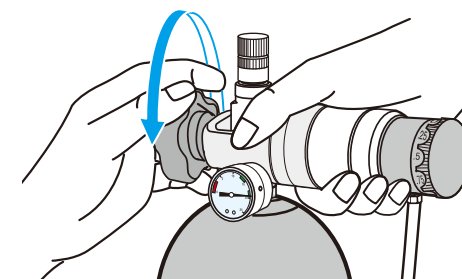

この操作早見表は、外出先等で参照していただくために、取扱説明書の中の**操作に関係する部分を抜粋した**ものです。
ご使用前には**取扱説明書**をお読みください。

ご使用上の注意

- 火気を近づけないでください。
- 酸素と接触する部分に油脂類を付着させたまま使用しないでください。
- 本システムを落としたり衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温(40℃を越える)になる所には置かないでください。
- 本システムを分解、改造したりしないでください。
- 本システムを直接水がかかる所で使用しないでください。
- 外出中に事故、火災が付近であった場合にはすみやかに安全な所まで避難してください。

流量設定器TR

